


LookinBody 120


InBody Data Management Software

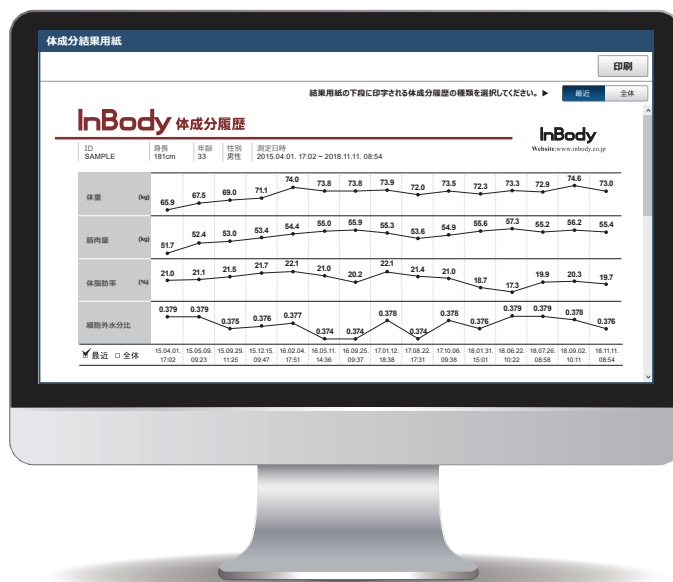

InBodyのデータがパソコンで管理できるLookinBody120


パソコン操作で InBody 測定を行い、データの閲覧・印刷ができます。

インターネットが使えない場所でも、パソコン内にサーバーを構築するため、ローカル環境で使用できます。

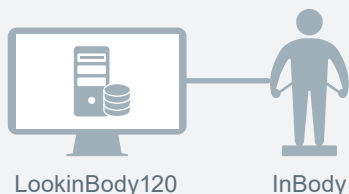


主な測定の流れ

測定前に個人情報を登録します。登録完了後、測定者はInBodyに乗ります。測定が完了すると、パソコンにデータが転送され、画面上で結果の閲覧ができます。

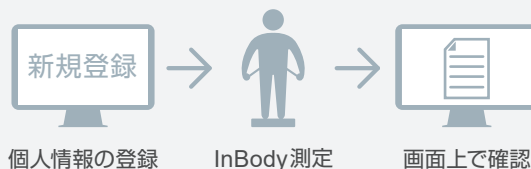


LookinBody120で利用できるサービス

以下のような機能をお客様のニーズに合わせて提供しています。

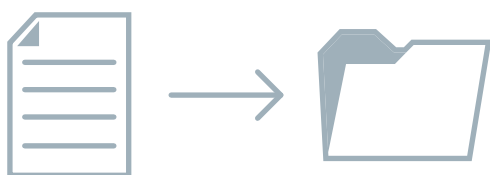

データエクスポート機能

測定結果を自動的に既定フォルダにエクスポートすることが可能です。^{*1}

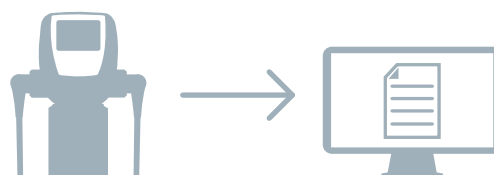

データインポート機能

InBody本体に保存したデータをUSBメモリーでコピーし、インポートすることが可能です。



複数人の連続測定

短い時間で多くの人を測定する場合、予め測定者を選択することで、個人情報の入力省けます。



豊富な接続方法

InBodyと接続する際は、有線接続だけでなく、Bluetoothや無線LANなどで繋ぐことができます。^{*2}

必要システム構成

OS: MS Windows 10(32bit/64bit)互換 CPU: 1.8GHz以上のプロセッサ HDD: 10GB以上の空き容量 RAM: 4GB以上 解像度: 1280×1024以上 通信ポート: USB、Serial(RS-232C)、LAN、Wi-Fi、Bluetooth InBody対応機種: InBody770、InBody S10、InBody570、InBody470、InBody270

InBodyの活用度を高めてくれるデータ管理ソフトウェア

パソコンで測定結果を管理することで、様々な機能の追加や測定者の入力間違い防止に便利です。

The screenshot displays the Lookin'Body120 software interface. It is divided into several sections:

- 測定者選択 (Measurer Selection):** Includes search fields for name and date, and a '新規登録' (New Registration) button.
- 測定選択 (Measurement Selection):** A large red button labeled 'InBody 測定'.
- 結果管理 (Result Management):** Contains buttons for '結果用紙印刷' (Print Result Paper), 'Eメール送信' (Send Email), and 'データ修正' (Data Correction).
- 環境設定 (Environment Settings):** Located in the top right corner.
- 使用案内 (Usage Guide):** A sidebar on the right with a 'InBody 測定をしています。' (InBody Measurement is in progress.) notification and a progress indicator showing 84%.
- 測定者一覧 (Measurers List):** A table listing 165 measurers with columns for selection, name, ID, height, age, gender, personal info, and measurement results.

選択	氏名	ID	身長 (cm)	年齢	性別	個人情報	測定結果
<input checked="" type="checkbox"/>	Jane Doe	SM2008	156.9	51	女性	個人情報	InBody
<input type="checkbox"/>	Jennifer	JT2000	165	29	女性	個人情報	InBody
<input type="checkbox"/>	マイケル・トーマス	MT1983	180	35	男性	個人情報	InBody
<input type="checkbox"/>	伊東 花子	IH1965	150	55	女性	個人情報	InBody
<input type="checkbox"/>	岡田 宏	OH1959	170.5	60	男性	個人情報	InBody
<input type="checkbox"/>	吉田 久子	YH1951	152	68	女性	個人情報	InBody
<input type="checkbox"/>	荒川 智	222233	182	32	男性	個人情報	InBody
<input type="checkbox"/>	佐々木 京子	0101010	160	38	女性	個人情報	InBody
<input type="checkbox"/>	佐藤 進	5674377	172.5	42	男性	個人情報	InBody
<input type="checkbox"/>	山下 りえ	038464	156.2	29	女性	個人情報	InBody
<input type="checkbox"/>	山田 太郎	5746	174.5	61	男性	個人情報	InBody
<input type="checkbox"/>	上田 桃子	37484	161	34	女性	個人情報	InBody
<input type="checkbox"/>	青木 京子	468768	155	19	女性	個人情報	InBody
<input type="checkbox"/>	田中 茂	413	175	63	男性	個人情報	InBody
<input type="checkbox"/>	鈴木 一郎	087687	170	54	男性	個人情報	InBody

① 個人情報の管理・登録

測定者の個人情報をID別に管理することができます。また、氏名などの詳細な個人情報も登録することができます。

② InBody測定

InBodyと有・無線で接続すると、測定したデータや設定情報が実時間で転送され、データ管理ソフトからInBody測定の指示を出すことができます。*2

③ InBody(測定結果)

InBody本体から印刷される結果用紙をそのまま画面に表示できます。体成分結果用紙に加えて項目毎に履歴の表示ができ、主な体成分の変化が分かります。

④ 結果用紙印刷

結果用紙をパソコンから印刷することができます。直近の測定結果だけではなく、履歴結果用紙の印刷も簡単にできます。*3

⑤ Eメール送信

個人情報で登録したメールアドレスに、体成分結果用紙や履歴結果用紙などを添付してメール送信することができます。

⑥ 環境設定

体成分結果用紙の項目変更・測定結果のエクセル変換・データバックアップ・旧LookinBodyデータのインポートなど、様々な機能が使用できます。*4

その他便利な機能

個人情報の(病歴 / 区分)設定 / データバックアップ・復元 / 複数名の連続測定 / 血圧値の手入力・管理 / 血糖値の手入力・管理 / 身長計(BSM370/170)の連動 / 画面ロック

*1 出力形式はCSV、JPG、PDFです。詳細につきましては、お問い合わせください。 *2 InBody S10は有線接続(USB、Serial(RS-232C))のみ対応しています。 *3 InBody S10の専用結果用紙とLookinBody120から印刷される体成分結果用紙はレイアウトが異なります。 *4 旧LookinBodyデータのインポートは、現在使用しているソフトのバージョンによってアップデートする必要があります。

個人情報管理とセキュリティ設定



個人情報の管理

測定に必要な必須情報の他に連絡先・病歴なども登録でき、情報のアクセスを制限することもできます。

測定結果のエクセル変換

エクスポートしたエクセルファイルは、個人情報で登録した情報が全て追加されるので、集計や分析に便利です。

体成分の変化を確認する測定結果用紙

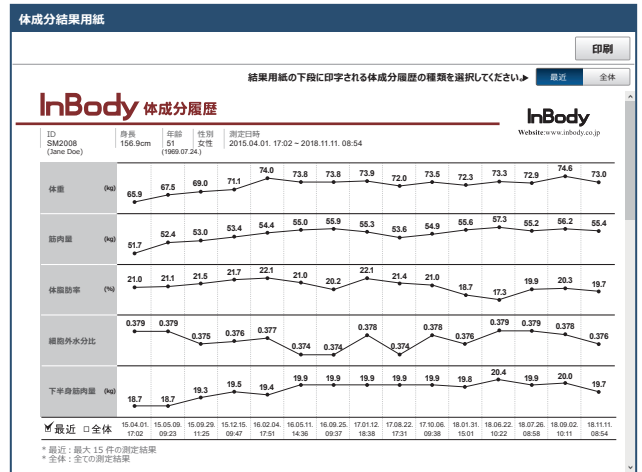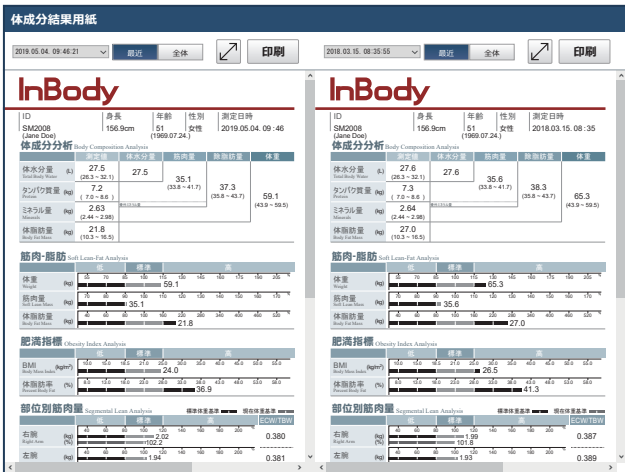

体成分結果用紙の比較

測定年月日を選択して過去に測定した結果を閲覧したり、比較をすることができます。

履歴結果用紙の印刷

必要な項目のみを選択して印刷することができます。最大15件の測定結果が折れ線グラフで確認できます。

外国製造業者(InBody Co., Ltd. Factory)が取得している認証



InBody 株式会社インボディ・ジャパン www.inbody.co.jp

- 東京本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル
Tel 03-5875-5780 Fax 03-5875-5781
- 大阪営業所 Tel 06-6155-6937 Fax 06-6155-6938
- 仙台営業所 Tel 022-302-6301 Fax 022-302-6302
- 名古屋営業所 Tel 052-684-9616 Fax 052-684-9617
- 広島営業所 Tel 082-236-7630 Fax 082-236-7631
- 松山営業所 Tel 089-948-9073 Fax 089-948-9074
- 福岡営業所 Tel 092-292-1766 Fax 092-292-1776

InBody、LookinBodyは株式会社インボディ・ジャパンの登録商標です。