

# IB Battery 220

ユーザーマニュアル

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーマニュアル(本書)をお読みください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性があることを示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。

---

## InBody

本製品に問題が生じた場合、下記の連絡先までお問い合わせください。

### 株式会社インボディ・ジャパン

〒137-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル

Tel: 03-5875-5780 Fax: 03-5875-5781

Website: <https://www.inbody.co.jp> E-mail: [inbody@inbody.co.jp](mailto:inbody@inbody.co.jp)

本書の内容の一部または全てを無断でコピーしたり、他の媒体(磁気、電気、写真等の如何を問わず)や他システムに転用したりすることを禁じます。本書の校正には注意を払っておりますが、誤字・脱字がある可能性があり、予告なしに変更することがあります。(株)インボディ・ジャパンは本書に述べられた必要条件を満たさないことによってもたらされた損害については一切の責任を負いかねます。

# ユーザーマニュアル目次

## 日本語

1. バッテリーの構成	4
2. バッテリーの充電方法	6
3. バッテリーの操作方法	7
4. バッテリーの構成	7
5. 仕様	8

# IB Battery 220

---

**ユーザーマニュアル**


日本語

## 1. バッテリーの構成

① IB Battery 220

② バッテリーケーブル

③ 取扱説明書

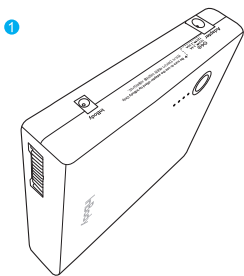

IB Battery 220



バッテリーケーブル



取扱説明書

## 警告

- ・このバッテリー(IB Battery 220)は、(株)インボディ・ジャパンの製品のみで使用できます。マニュアルに記載されている事項以外の目的には使用しないでください。
- ・熱や火気、直射日光を避けてください。
- ・特に60℃を超える環境で保管したり、使用したりしないでください。
- ・火の中に入れてください。
- ・バッテリーの端子に金属製品が触れないようにしてください。
- ・動物の鋭い歯や先の尖ったもので製品が刺されたり、毀損されないようにしてください。
- ・製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の直接的な原因となり、無償保証の期間内でも無償修理の対象外となります。
- ・製品を水中に沈めたり、湿気の多い場所で長時間保管しないでください。故障の原因が浸水と判断され、保証の対象外となります。
- ・製品を任意で分解、または改造した場合、保証の対象外となります。
- ・製品を電子レンジに入れてください。

## 注意

- ・バッテリーが異常に熱くなったり、膨らんだりした場合、直ちに使用を中止して当社にお問い合わせください。
- ・バッテリー液が漏れた場合、液体に障らないでください。皮膚や衣服に付着した液体は、すぐに洗い流してください。
- ・バッテリーの端子が汚れた場合、乾いたやわらかい布で拭いてから使用してください。
- ・濡れた手で製品を触らないでください。感電や火災、故障の原因となります。
- ・浸水したバッテリーを使用しないでください。
- ・静電気の多く発生する環境では使用しないでください。誤動作の原因となります。
- ・磁石、または磁場の強い場所に製品を置かないでください。故障の原因となります。
- ・密閉された空間や高温多湿の場所で長時間保管しないでください。
- ・長時間使用しない場合、アダプタの電源コードを抜いて保管してください。
- ・使用済み製品は地方自治体の処理規定に従って廃棄してください。
- ・バッテリーの間違った使用は装置の性能を低下させたり、損傷による火災の原因となります。

## 2. バッテリーの充電方法


バッテリーを充電する方法は、バッテリーに直接アダプタを接続して充電する方法(急速充電)と、InBody装置(BWA・S10)にバッテリーを内蔵するか、バッテリーケーブルでバッテリーと装置を接続し、動作状態で充電する方法(低速充電)があります。

### ⚠ 注意

- ・ご購入後に初めてバッテリーを使用する場合は、バッテリーを完全に充電してから使用してください。
- ・バッテリーの寿命は環境に影響を受けやすいので、仕様上の動作及び保管環境で使用してください。
- ・必ずInBody装置(BWA・S10)に付属されているアダプタをご使用ください。



#### ① 単独充電の場合(急速充電)

- ・専用アダプタを利用してバッテリーを充電することができます。バッテリーの残量は、LEDランプの点灯個数で確認できます。充電中の場合はLEDランプが点滅します。

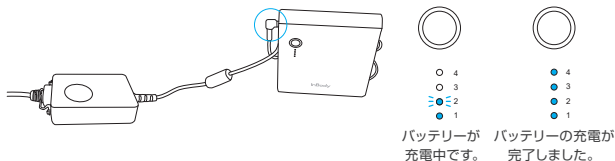

#### ② InBody装置(BWA・S10)と接続状態で充電の場合(低速充電)

- ・バッテリーとInBody装置(BWA・S10)をバッテリーケーブルで接続した状態、または装置にバッテリーを内蔵した状態で、装置の動作条件下で専用のアダプタを使ってバッテリーを充電することができます。

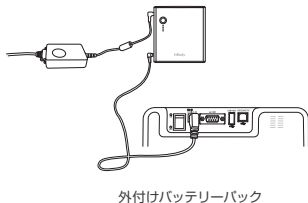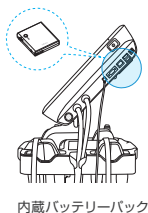

### ⚠ 注意

- ・接続方法については、ユーザーマニュアルを参照してください。

### 3. バッテリーの操作方法

#### ① 充電時

アダプタを接続して充電しているときは、バッテリー残量表示LEDが点滅します。4つのLEDがすべて点灯し、点滅が止まったら充電完了です。

#### ② バッテリーの残量確認及び充電時間

バッテリーのボタンを「ピー」という音がするまで長押しします。「ピー」という音がしたら、およそ3秒後にLEDで残量を表示します。バッテリーが放電される直前は、最後に残っているLEDランプが点滅し、約1分間隔で「ピピピ」という警告音が鳴動するので、早くバッテリーを充電してください。



#### ③ バッテリー残量表示のON/OFF

- ・LED残量表示ランプが点灯する場合：ボタンを押すとき、アダプタを接続して充電しているとき、装置と接続して装置が作動中のときです。
- ・LED残量表示ランプが消灯する場合：バッテリーの残量がないとき、LED残量表示ランプが点灯する条件でないときに約6秒後に自動で消灯します。

#### ⚠ 注意

- ・バッテリー残量確認ボタンは、バッテリーの残量を確認するボタンです。IB Battery 220には電源ON/OFF機能がありません。

### 4. バッテリーの構成

#### ① 電源アダプタ接続端子

：バッテリーだけを充電するとき、アダプタを接続する端子です。

#### ② InBody装置(BWA・S10)外部接続端子

：専用のバッテリーケーブルを利用してInBody装置(BWA・S10)とバッテリーを接続するときに使用する端子です。

#### ③ InBody BWA接続コネクタ

：InBody BWAにバッテリーを内蔵するときに接続するコネクタです。


#### ④ バッテリー残量表示LED

：バッテリーの残量を表示するLEDです。

#### ⑤ 残量確認ボタン

：バッテリーのボタンを「ピー」という音がするまで長押しします。

「ピー」という音がしたら、およそ3秒後に4つのLEDで残量を表示します。

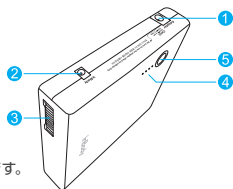

IB Battery 220



## 5. 仕様

品目名	IB Battery 220
定格容量／電圧	5100mAh、3ICR19/65-2/10.89V <sup>≡</sup> , 55.54Wh
定格入力	12V <sup>≡</sup> , 3.34A or 3.4A (InBody装置(BWA・S10)専用のアダプタ使用)
充電時間	急速充電(約3時間) / 低速充電(約8時間)
容量表示	4レベルのLED容量表示
動作環境	0~40°C(32°F~104°F), 30~75% RH, 70~106kPa
保管環境	-20~25°C(-4°F~77°F), 10~80% RH, 50~106kPa
重量	380g

