
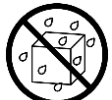



使用上の注意事項

- ・安全に関する重要な内容を含みますので、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
- ・誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生、測定値の異常が想定される内容を示しています。

絵表示の例	 注意	 水濡れ禁止	 指示を守る
-------	--	---	---

 警告			
 注意	物を乗せない 体重測定部に物を乗せないでください。測定値が不正確になる恐れがあります。		 注意
 注意	強く握らない 手電極を強く握ると、破損する恐れがあります。強く握って測定しても測定結果は変わりません。		 注意
 指示を守る	正しく消毒する 消毒液を乾いた布や脱脂綿に染み込ませ、定期的にお手入れしてください。機器に直接噴霧することは絶対にしないでください。 <small>詳細は別紙の【消毒する際の注意事項】をご参照ください</small>		 指示を守る
 指示を守る	平らな場所で測定 硬く平らな安定した場所で使用してください。測定値が不正確になる恐れがあります。		 指示を守る
 指示を守る	アースの取付 電源はアースを取ってください。タップをご使用の際は100V・15A以上で、InBody関連の機器以外は接続しないでください。 <small>3Pプラグまたは接地アダプター使用</small>		 指示を守る
 注意	衝撃を与えない 強い衝撃を与えないでください。故障及び測定値が不正確になる恐れがあります。		 注意
 指示を守る	曲げすぎない 手電極のバーを曲げたり、反対方向に回転させないでください。破損する恐れがあります。		 指示を守る
 指示を守る	停電時の使用 停電の際は事前に電源プラグをコンセントから抜いてください。動作不良や故障の原因になります。		 指示を守る
 指示を守る	長時間の使用 24時間以上使用される場合は1日に1回再起動をしてください。機器を使用しない場合は電源を切ることを推奨しています。		 指示を守る
 指示を守る	設置上の注意 電化製品の近くに設置しないでください。ノイズが発生して測定値が不正確になる恐れがあります。 <small>トレッドミル・冷蔵庫・エアコン・マッサージチェア・周波数治療器など</small>		