

LookinBody Web

ユーザーマニュアル

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーマニュアル(本書)をお読みください。



警告

本書の内容の一部または全てを、無断でコピーしたり他の媒体(磁気、電気、写真等の如何を問わず)やシステムに転用したりすることを禁じます。本書の校正には注意を払っておりますが、誤字・脱字がある可能性があり、予告なしに変更することがあります。(株)インボディ・ジャパンは本書に述べられた必要条件を満たさないことによってもたらされた損害については一切の責任を負いかねます。

LookinBody Web の機能や結果項目に対する説明など、より詳細な情報は(株)インボディ・ジャパンのウェブサイト(<https://www.inbody.co.jp>)から閲覧したり、ダウンロードしたりすることができます。製品の外観や仕様などは性能改善のため、予告なしに変更される場合があります。

InBody

LookinBody Web に問題が生じたり、臨床に関する質問が生じたりした場合、下記の連絡先までお問い合わせください。

株式会社インボディ・ジャパン

〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル

Tel: 03-5875-5780 Fax: 03-5875-5781

Website: <https://www.inbody.co.jp>

E-mail: inbody@inbody.co.jp

本書の内容の一部または全てを、無断でコピーしたり他の媒体(磁気、電気、写真等の如何を問わず)やシステムに転用したりすることを禁じます。本書の校正には注意を払っておりますが、誤字・脱字がある可能性があり、予告なしに変更することがあります。(株)インボディ・ジャパンは本書に述べられた必要条件を満たさないことによってもたらされた損害については一切の責任を負いかねます。

InBody に関する更なる機能と結果項目説明などの詳細な情報は、インボディ・ジャパンのウェブサイト(<https://www.inbody.co.jp>)にて閲覧できます。なお、製品の外観、仕様などは性能改善のために予告なしに変更されることがあります。

©1996～ InBody Japan Inc. All rights reserved. IM-JPN-LBWEBM-220401

LookinBody Web


ユーザーマニュアル目次

I. 管理者及びスタッフ登録	
A. 管理者登録	4
B. スタッフアカウントの登録	5
II. InBody と LookinBody Web の連動	
A. 連動方法	7
B. チュートリアル	9
III. 登録者管理	
A. 新規登録	10
B. 登録者情報の修正	12
C. 複数人の個人情報を登録	13
D. 臨時保存データの登録	15
E. 退会者情報の登録	17
F. 複数登録者の情報修正	19
G. Excel ダウンロード	20
H. メール送信	21
I. チャットルーム開設	23
J. 測定データの印刷	27
K. 測定データの併合	28
L. パスワードの変更	29
IV. InBody 測定結果	
A. InBody 測定結果及び履歴の確認	31
B. 目標設定	32
C. 説明資料	33
D. InBody 比較分析	34
E. メモ機能	35
F. 測定者の体型写真	36
G. InBody 測定結果の表示項目の設定	37
V. 測定者及び測定データの集計	
A. ダッシュボード	38
B. レポート	39
VI. 環境設定	
A. 共通	47
B. InBody 測定関連	50
C. LookinBody データ関連	55
D. アカウント設定	59
VII. よくある質問	
A. 接続に関して	60
B. 登録に関して	61
C. データに関して	61
VIII. 利用金額及び決済方法	
A. ライセンスの延長	62
B. LookinBody Web の基本料金	63

I. 管理者及びスタッフ登録

A. 管理者登録

LookinBody Web を使用するには管理者アカウントが必要です。アカウントの登録はインターネットブラウザ(Google Chrome 推奨)を起動して、アドレスバーに <https://jpn.lookinbody.com> を入力して、LookinBody Web ページに接続します。管理者ログインの[新規登録]を選択してください。

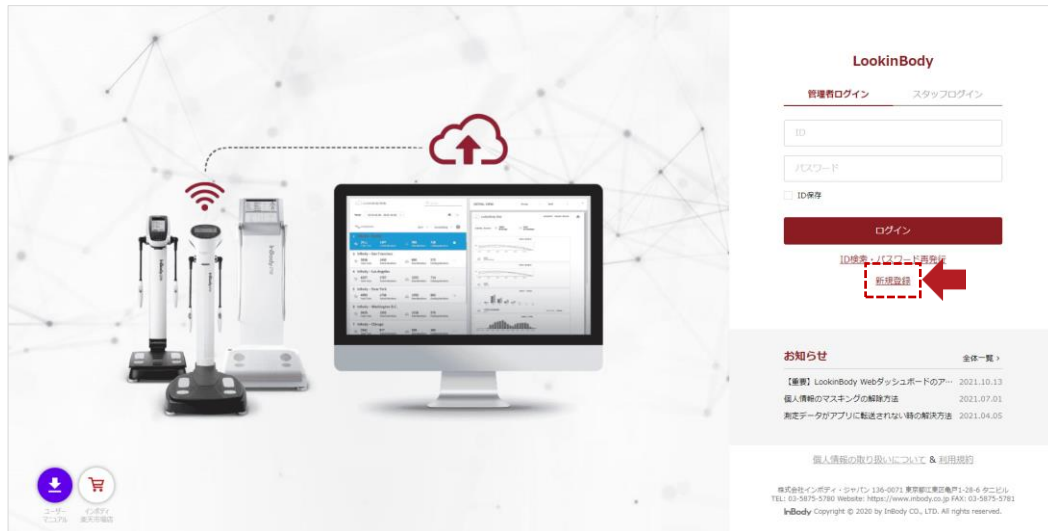

登録に必要な情報を入力し、[アカウント登録]を選択します。

LookinBody

管理者登録

ID *

パスワード *

パスワード確認 *

メール *

メールアドレスは、パスワードを忘れたときに必要です。

施設名 *


個人情報の取り扱いについてと利用規約に同意します。

アカウント登録

株式会社インボディ・ジャパン | 136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル |
TEL: 03-5875-5780 | Website: <https://www.inbody.co.jp> | FAX: 03-5875-5781 |
InBody Copyright © 2014 by InBody CO., LTD. All rights reserved.

B. スタッフアカウントの登録方法


LookinBody Web ではスタッフアカウントを追加で登録することができます。管理者アカウントでログインして、スタッフ管理より[スタッフ登録]を選択してください。新規登録に限りはありませんが、管理者画面からログイン権限を付与できるのは2つのアカウントのみ(基本契約の場合)です。

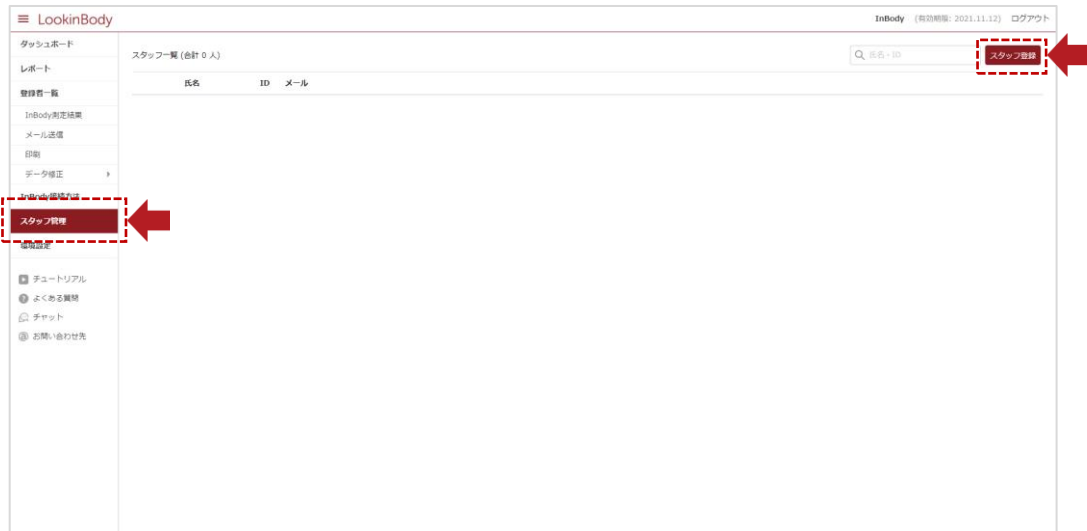


1. アカウント情報と権限を設定して[確認]を押します。

The screenshot shows the 'スタッフ登録' (Staff Registration) form. The form is titled 'スタッフ登録' and has a sub-heading 'スタッフアカウントの作成'. It contains several sections: 'アカウント情報' (Account Information) with fields for '氏名' (Name), 'ID', 'メール' (Email), 'パスワード' (Password), and 'パスワードの確認' (Confirm Password); 'スタッフアカウントの権限' (Staff Account Permissions) with checkboxes for '登録者情報の取り扱い権限' (Handling of registrant information permissions) and 'メニューアクセス権限' (Menu access permissions); and a '確認' (Confirm) button at the bottom right. The '確認' button is highlighted with a red dashed box and a red arrow pointing to it.


2. スタッフの登録が完了したら、入力したメールアドレスにアカウント情報が送信されます。

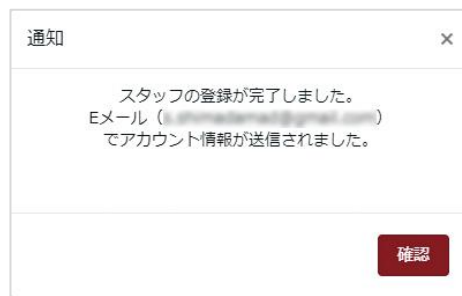

3. アイコンを選択して、スタッフアカウントの権限を修正することができます。

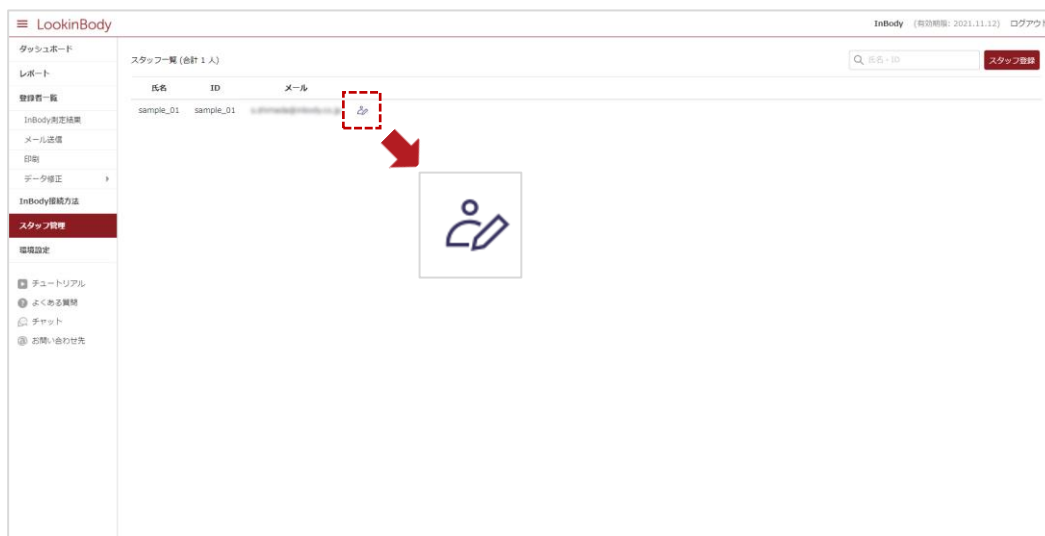

4. スタッフの登録が完了したら、ログイン画面よりスタッフアカウントでログインすることができます。

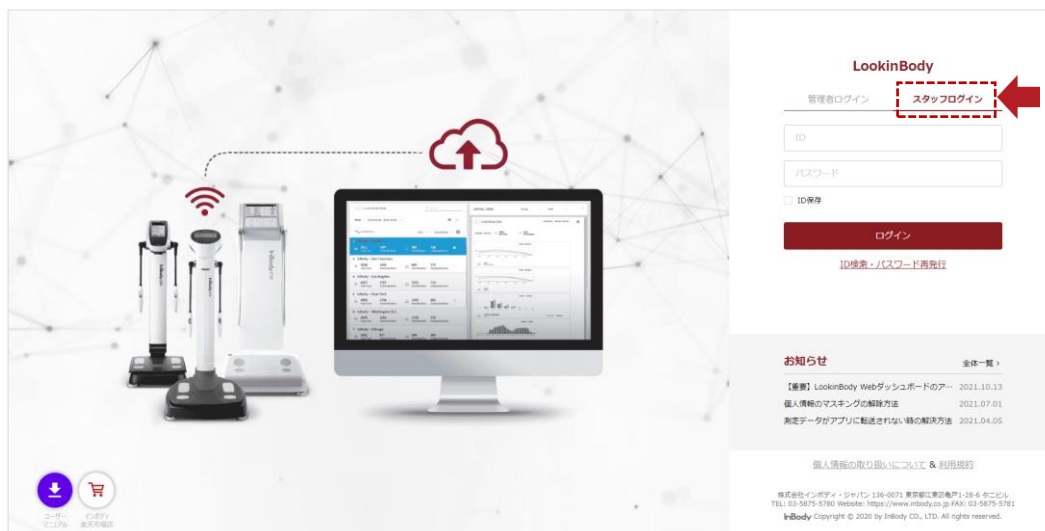

II. InBody と LookinBody Web の連動

A. 連動方法

InBody と LookinBody Web を連動するためには、InBody 本体の環境設定から[04. クラウドサービス]及び[16. ネットワーク接続]の設定が必要です。


インターネット接続

1. 初期画面から管理者メニューを選択します。


* 画面イメージは InBody770 です。



2. パスワードを入力後、[16. ネットワーク接続]を選択します。

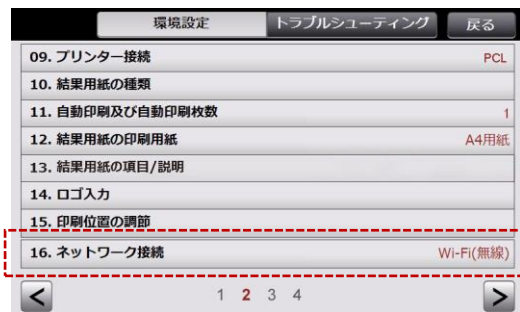

3. [O]ボタンを選択し、案内に従ってネットワーク接続を設定してください。

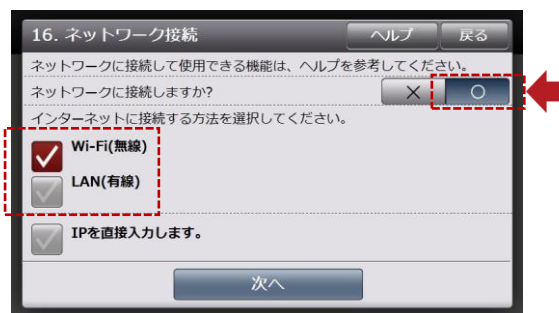


4. インターネット接続が成功すると、InBody 本体の画面上部にインターネット接続のアイコンが表示されます。

* 有線接続の場合、画面左上のアイコンは表示されません。



クラウドサービス

5. [04. クラウドサービス]を選択します。

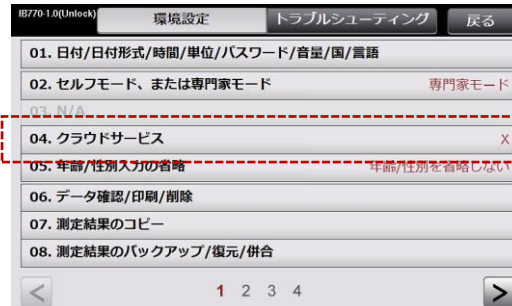

6. [○]を選択し、LookinBody Web アカウントを設定します。



7. LookinBody Web アカウントの ID とパスワードを入力してログインを選択します。



8. トップ画面の上部に雲のアイコンが表示されたら、InBody の設定は完了です。



B. チュートリアル

LookinBody Web の操作方法が分からない、または運用の流れを確認したい場合、チュートリアルを確認してください。




チュートリアルリスト

- ・ スタッフアカウントの作成 5 ページを参照
- ・ InBody本体の設定 8 ページを参照
- ・ 個人情報のアップロード 13 ページを参照
- ・ InBody測定とデータ確認 31 ページを参照
- ・ 区分設定 11 ページを参照
- ・ 測定データのアップロード 58 ページを参照

III. 登録者管理

A. 新規登録

メニューの[登録者一覧]から[新規登録]を選択して、個人情報を入力します。

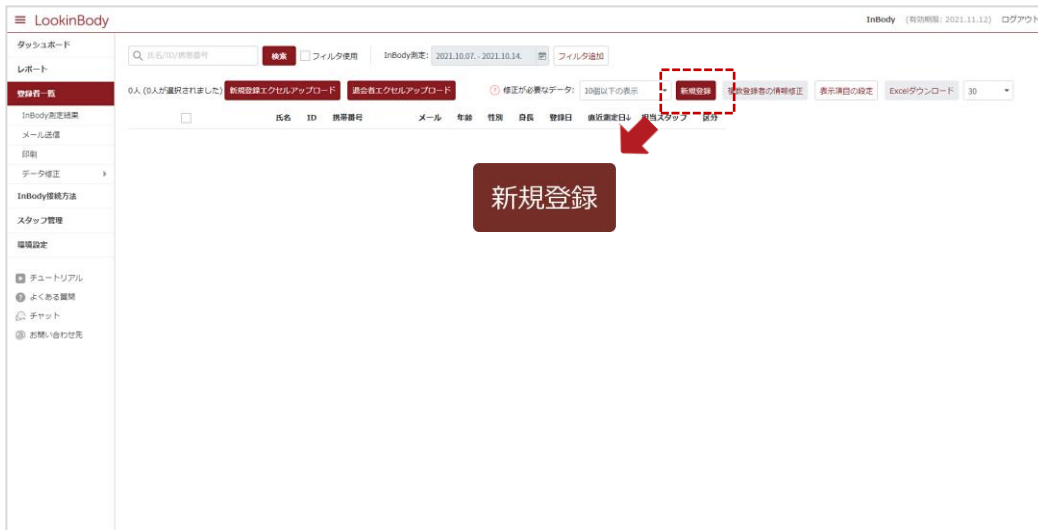

新規登録

基本情報

氏名

携帯番号

ID *

IDを自動入力
 携帯番号をIDとして使用

身長 *
 cm
InBody測定に使用されます。

生年月日 *
 年 月 日
InBody測定に使用されます。

性別 *
 女性 男性
InBody測定に使用されます。

キャンセル 完了

〈ID・身長・生年月日・性別は必須入力です〉

新規登録

追加情報

登録日 退会日

担当スタッフ

病歴

区分

メモ

メール
測定結果の内容をメールで送信できます。

電話

住所

キャンセル 完了

〈追加情報は必須入力ではありません〉

担当スタッフ設定

担当スタッフを登録することで、チャットルームの開設や測定データの集計に便利です。
新規登録時(または個人情報修正)に[追加情報]→[担当スタッフ]でスタッフを選択します。
* 担当スタッフはスタッフアカウントを登録しないとリストが表示されません。



担当スタッフ

sample_01

sample_01

病歴設定

該当する病歴を選択することで、病歴毎に測定データを管理・集計・印刷することができます。
新規登録時(または個人情報修正)に[追加情報]→[病歴]で該当する病歴を選択します。
✎ アイコンを選択して、新しい病歴を登録することができます。



病歴

脂質異常症


高血圧

糖尿病

心臓病

区分設定

登録者を区分(グループ)分けに登録することで、区分毎に測定データを管理・集計・印刷することができます。
新規登録時(または個人情報修正)に[追加情報]→[区分]で区分を選択します。
✎ アイコンを選択して、新しい区分を登録することができます。

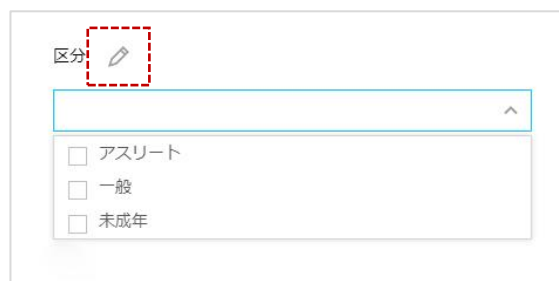

区分


アスリート

一般

未成年

B. 登録者情報の修正

登録者情報の修正

メニューの[登録者一覧]から  アイコンを選択して、個人情報を修正することができます。

氏名	ID	携帯番号		
sample****	0***	080-*****		

個人情報修正

基本情報

氏名
sample_001

携帯番号
080-*****

ID *
0001

身長 *
175.0 cm
InBody測定に使用されます。

生年月日 *
1990 年 7 月 8 日 31歳
InBody測定に使用されます。

性別 *
 女性 男性
InBody測定に使用されます。

追加情報

登録日 退会日
2021.10.14 2021.10.14

登録者の削除

登録者を削除するときは、個人情報修正の下段にある[登録者削除]を選択してください。

* 削除した個人情報(測定データ)は、復元することができませんのでご注意ください。

C. 複数人の個人情報を登録

新規登録エクセルアップロード

登録者一覧の[新規登録エクセルアップロード]から登録者の情報を入力したファイルをアップロードすることで、個人情報を一括で追加することができます。

1. 登録者一覧の[新規登録エクセルアップロード]を選択します。




2. [ダウンロード]ボタンを押してください。



3. 画面の左下に Excel データが表示されるので、選択してください。

- * [LBGroupRegistration.xls]は下記のような形式になります。
- * Microsoft Excel 2003から2019まで対応します。それ以外のバージョンでは、[LBGroupRegistration.xls]は開けません。
- * 個人情報を入力する際は、必ず「例」を参考にしてください。
- * 個人情報(必須)項目は、全て入力してください。
- * IDが重複しないように入力してください。
- * IDは半角の英数字のみで入力してください。(1~14文字)

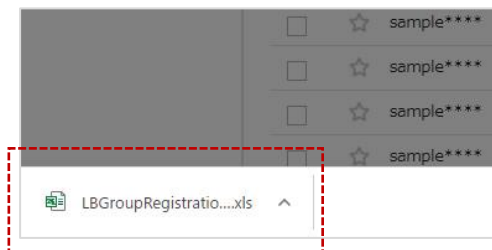

Excelファイルインポート							
下記の内容を参考にし、個人情報を入力してください。							
<ul style="list-style-type: none"> 必ずこの形式に従って個人情報を入力してください。様式を変更すると、インポートができなくなります。 例(※参考)は、「入力」の下段から情報を入力してください。 個人情報(必須)項目は、全て入力してください。 IDが重複しないように入力してください。 IDは半角の英数字のみで入力してください。(1~14文字) 							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	氏名	ID	身長	性別(男性: M, 女性: F)	生年月日	年齢	個人情報(任意)
8	テスト	test	176.0	M	1990.02.18.	23	携帯電話 09012345678 電話 0301235678
9							
10							
11							
12							
13	氏名	ID	身長	性別(男性: M, 女性: F)	生年月日	年齢	個人情報(任意)
14	サンプル1	sample_1	155.2	F	1990.10.01.	29	
15	サンプル2	sample_2	180.6	M	1985.07.24.	34	
16	サンプル3	sample_3	175.5	M	1970.01.15.	49	
17	サンプル4	sample_4	170.2	M	1968.05.23.	51	
18	サンプル5	sample_5	161.0	F	1995.03.04.	24	
19	サンプル6	sample_6	159.6	F	1992.08.29.	27	
20	サンプル7	sample_7	185.0	M	2000.02.19.	19	
21	サンプル8	sample_8	149.5	F	1953.09.04.	66	
22							
23							



4. 作成したファイルを[ファイル選択]ボタンから選択し、[アップロード]ボタンを押して読み込むと、個人情報のアップロードが開始されます。



5. 個人情報のアップロードが完了したら、下図のようなポップアップアイコンが表示されます。



6. ファイルをアップロードしたら、[ダッシュボード]の[登録・退会者数]に反映され、[トレンド]で新規登録者数の推移を確認することができます。

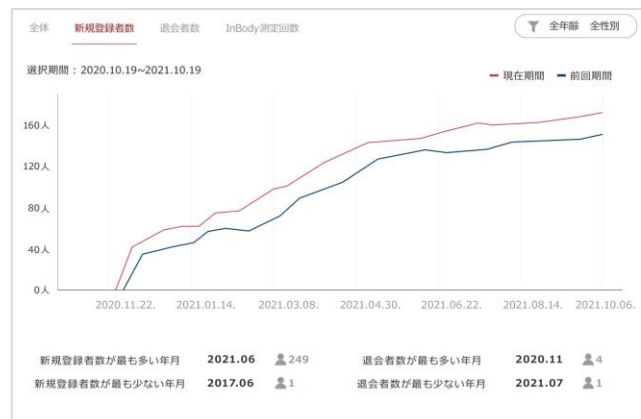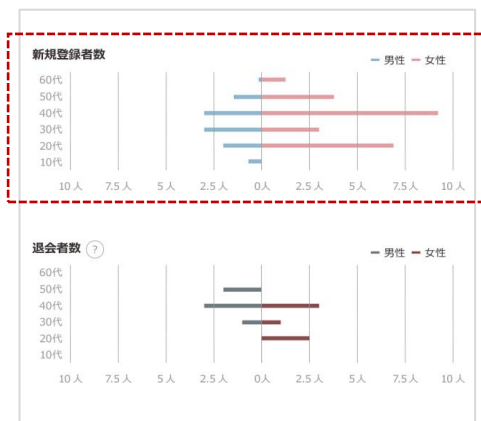

D. 臨時保存データの登録

ID 未入力で測定した場合

ID 未入力で測定した場合、[登録者一覧]に保存データが赤く表示されます。ID を入力することで既存 ID のデータや、新規の登録者として保存することができます。

ID	氏名	ID	誕生日	年齢	性別	身長	体重	登録日	再測定日	再測定アップ	操作
	sample****	0***	080975885**	31	男性	175.0		2021.10.18			
<input type="checkbox"/>	☆ sample****	0***	090215170**	41	男性	162.0		2021.10.15	2021.10.15		
<input type="checkbox"/>	☆ sample****	0***	090654120**	45	女性	153.0		2021.10.15	2021.10.15		
<input type="checkbox"/>	☆ sample****	0***	080779230**	54	女性	152.0		2021.10.15	2021.10.15		
<input type="checkbox"/>	☆ sample****	0***	070649138**	51	女性	148.0		2021.10.15	2021.10.15		
<input type="checkbox"/>	☆ sample****	0***	080769412**	32	女性	161.0		2021.10.15	2021.10.15		
<input type="checkbox"/>	☆ sample****	0***	090693952**	27	女性	152.0		2021.10.15	2021.10.15		
<input type="checkbox"/>	☆ sample****	0***	080463197**	38	女性	158.0		2021.10.15	2021.10.15		
<input type="checkbox"/>	☆ sample****	0***	070968524**	41	女性	160.0		2021.10.15	2021.10.15		
<input type="checkbox"/>	☆ sample****	0***	090654997**	23	女性	155.0		2021.10.15	2021.10.15		
<input type="checkbox"/>	☆ sample****	0***	080234691**	32	女性	150.0		2021.10.15	2021.10.15		
<input type="checkbox"/>	☆ sample****	0***	090996485**	35	女性	151.0		2021.10.15	2021.10.15		
<input type="checkbox"/>	☆ sample****	0***	070441395**	24	女性	150.0		2021.10.15	2021.10.15		
<input type="checkbox"/>	☆ sample****	0***	070858876**	29	女性	153.0		2021.10.15	2021.10.15		
<input type="checkbox"/>	☆ sample****	0***	090674181**	28	女性	146.0		2021.10.15	2021.10.15		
<input type="checkbox"/>	☆ sample****	0***	080748536**	31	女性	152.0		2021.10.15	2021.10.15		
<input type="checkbox"/>	☆ sample****	0***	080254736**	23	女性	149.0		2021.10.15	2021.10.15		

臨時保存データ

測定時に入力した個人情報の中で赤く表示された項目が、既存IDの情報と異なるため、臨時保存データとして登録されました。
下の臨時保存データを既存IDのデータとして保存したり、削除することができます。

臨時保存データ

InBody測定日
2021.05.24. 14:06

ID
sample

携帯番号
080-*****

身長
177.0 cm

生年月日が間違っています。生年月日を正しく入力してください。
1981 年 1 月 1 日 40歳

性別
 女性
 男性

LookinBody Web

データを保存しました。

既存IDと異なる情報を入力して測定した場合

測定時に入力した個人情報(身長・年齢・性別)が LookinBody に登録されている情報と異なる場合、臨時保存データとして登録されます。個人情報を正しく入力することで既存IDのデータとして保存することができます。

【臨時保存データとして扱われる条件】

- ① ID を未入力して測定した場合
- ② 入力した携帯番号が別のIDで使用されている場合
- ③ 性別の変更、または身長を±5cm or 年齢を±3歳以上変更した場合
- ④ 入力した携帯番号の形式に異常がある場合

* 性別や身長入力を誤って測定した場合、測定結果や評価基準が変わるため、再測定をおすすめします。

E. 退会者情報の登録

退会者エクセルアップロード

登録者一覧の[退会者エクセルアップロード]から登録者の情報を入力したファイルをアップロードすることで、ダッシュボードの[トレンド]に一括で退会者に分類できます。

* 削除した登録者を退会者に移行することはできません。

1. 登録者一覧の[退会者エクセルアップロード]を選択します。



2. [登録用エクセルダウンロード]ボタンを押してください。



3. 画面の左下に Excel データが表示されるので、選択してください。

* [LBGroupRegistration.xls]は下記のような形式になります。


* Microsoft Excel 2003から2019まで対応します。それ以外のバージョンでは、[LBGroupRegistration.xls]は開けません。

* 個人情報を入力する際は、必ず「例」を参考にしてください。

* 個人情報(必須)項目は、全て入力してください。

* IDが重複しないように入力してください。

* IDは半角の英数字のみで入力してください。(1~14文字)

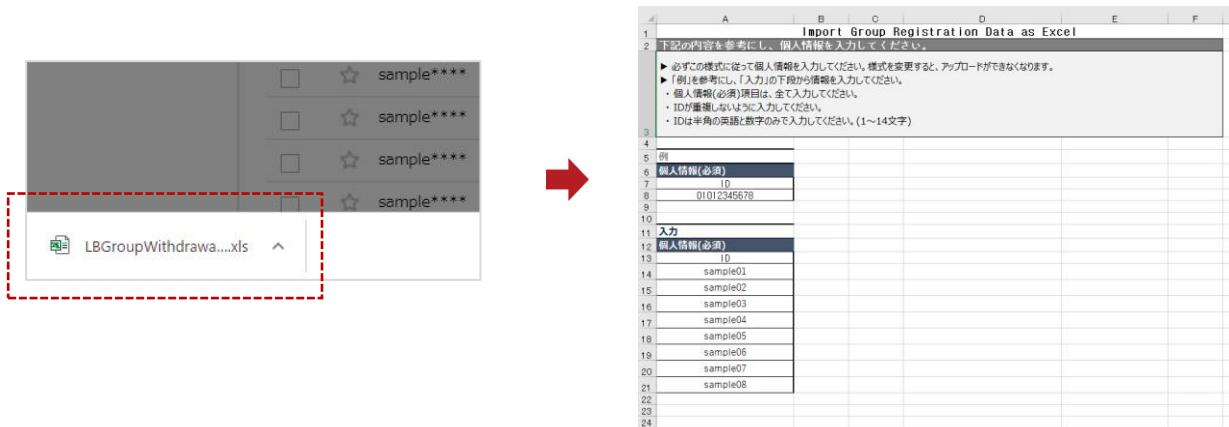


4. 作成したファイルを[アップロード]ボタンを押して読み込むと、個人情報のアップロードが開始されます。



5. 個人情報のアップロードが完了したら、下図のようなポップアップアイコンが表示されます。




6. ファイルをアップロードしたら、[ダッシュボード]の[登録・退会者数]に反映され、[トレンド]で退会者数の推移を確認することができます。

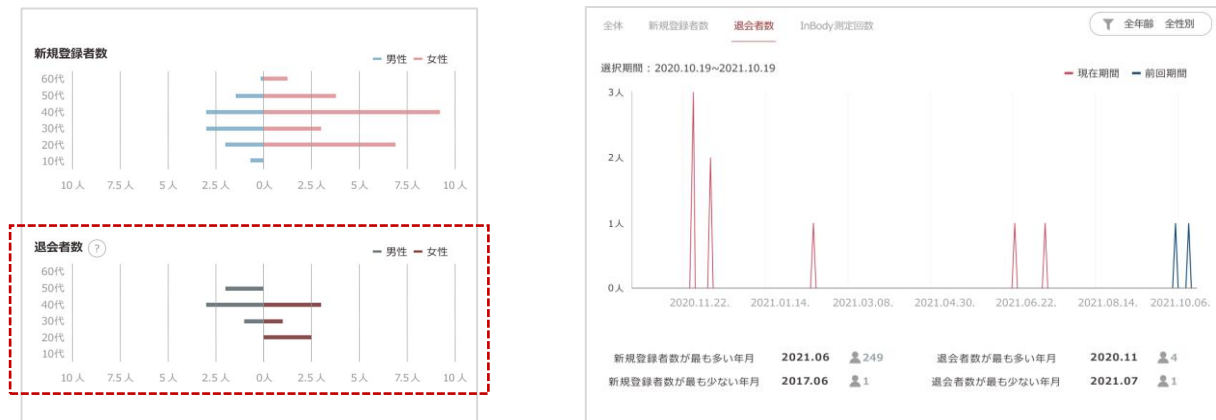

F. 複数登録者の情報修正

LookinBody Web で管理している登録者の個人情報を Excel ファイルでダウンロードすることができます。

1. 登録者一覧の[Excel ダウンロード]を選択します。

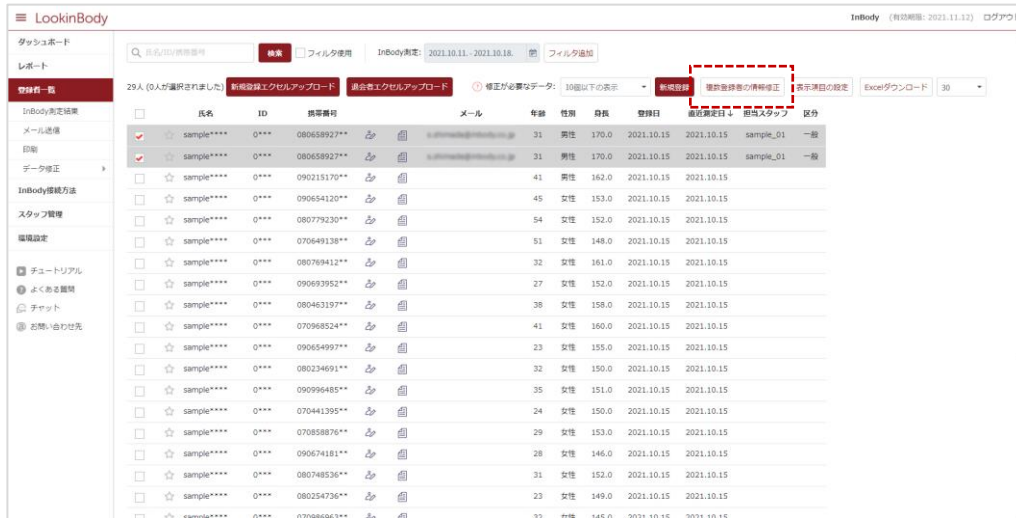

The screenshot shows the LookinBody Web interface. At the top, there is a search bar and a date range filter set to '2021.10.11 - 2021.10.18'. Below the search bar, there are several buttons: '検索', 'フィルタ変更', 'InBody測定', and 'フィルタ追加'. A red dashed box highlights the '複数登録者の情報修正' button. Below the buttons, there is a table with columns: '氏名', 'ID', '携帯番号', 'メール', '年齢', '性別', '身長', '登録日', '退会日', '担当スタッフ', and '区分'. The table contains 29 rows of data, with the first row highlighted in red.

氏名	ID	携帯番号	メール	年齢	性別	身長	登録日	退会日	担当スタッフ	区分
sample****	0***	080658927**	s.sample@lookinbody.co.jp	31	男性	170.0	2021.10.15	2021.10.15	sample_01	一般
sample****	0***	080658927**	s.sample@lookinbody.co.jp	31	男性	170.0	2021.10.15	2021.10.15	sample_01	一般
sample****	0***	090215170**		41	男性	162.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	090654120**		45	女性	153.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	080779230**		54	女性	152.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	070649138**		51	女性	148.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	080769412**		32	女性	161.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	090693952**		27	女性	152.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	080463197**		38	女性	158.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	070968652**		41	女性	160.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	090654997**		23	女性	155.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	080234691**		32	女性	150.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	090964855**		35	女性	151.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	070441395**		24	女性	150.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	070858876**		29	女性	153.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	090674181**		28	女性	146.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	080748936**		31	女性	152.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	080254736**		23	女性	149.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	070868663**		32	女性	145.0	2021.10.15	2021.10.15		

2. 担当スタッフ・病歴・区分・退会日を一括で設定することができます。



The dialog box is titled '複数登録者の情報修正' and contains the following fields and buttons:

- 担当スタッフ**: A dropdown menu with '複数情報' selected.
- 病歴**: A dropdown menu with '複数情報' selected and an edit icon.
- 区分**: A dropdown menu with '複数情報' selected and an edit icon.
- 退会日**: A dropdown menu.
- Buttons at the bottom: '解除', '退会キャンセル', 'キャンセル', and '完了'.


G. Excel ダウンロード

LookinBody Web で管理している登録者の個人情報をExcel ファイルでダウンロードすることができます。
 * 管理者アカウントのみ使用できます。

1. 登録者一覧の[Excel ダウンロード]を選択します。





2. ログイン時と同じパスワードを入力して[確認]を選択します。

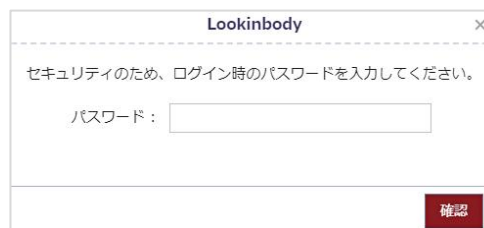

3. 期間を設定し、ダウンロードするデータを選択して[確認]を押します。[データ項目]からExcelファイルに変換する項目を選択することができます。

* データの種類: [InBody測定結果]と[登録者情報]からExcelをダウンロードします。

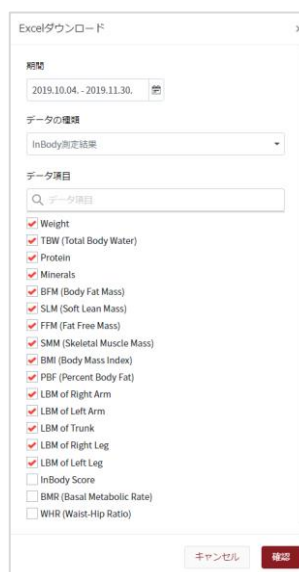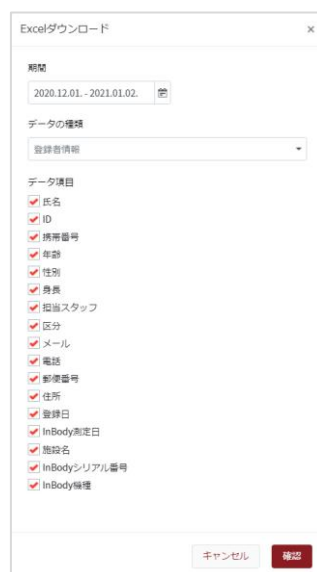


H. メール送信

LookinBody Web で管理している登録者に、チャットやメールなどでメッセージを送信することができます。

登録者選択


メニューの[登録者一覧]からメッセージを送る登録者を選択します。1名または複数名選択することができます。

* [メール送信を行う場合、メールアドレスの登録が必要です。

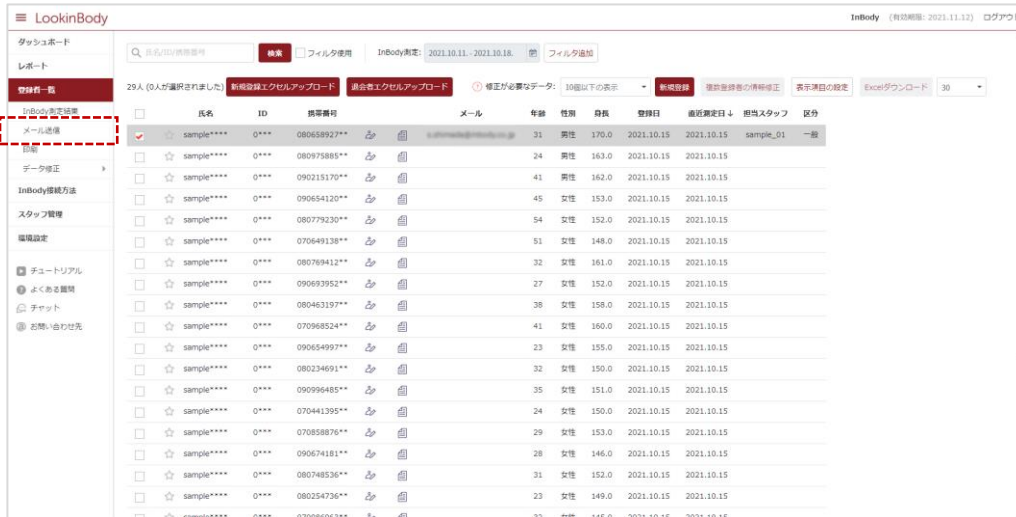

メール送信


メニューの[メール送信]を選択して、指定のメールアドレスに画像または結果用紙を添付して送信することができます。

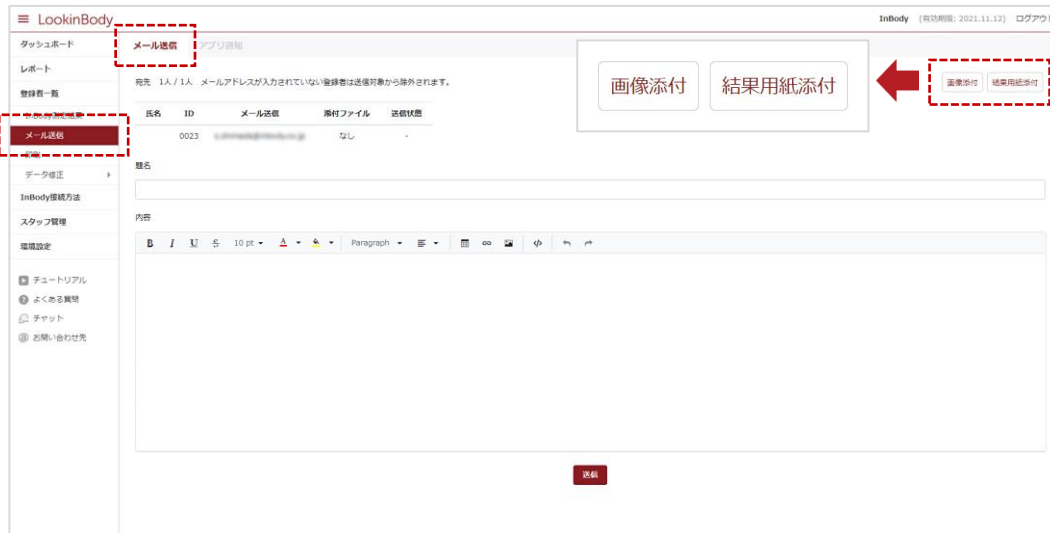

アプリ通知

メニューの[メール送信]→[アプリ通知]を選択して、メッセージを送ると登録者がアプリを起動していなくてもスマートフォンに表示することができます。

* InBody アプリをインストールしていない登録者には送信することができません。

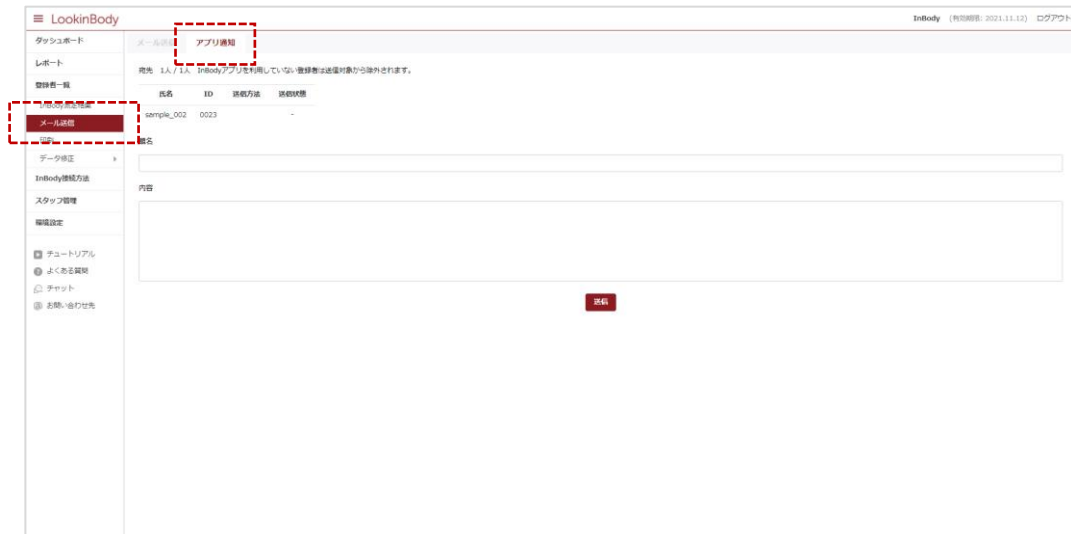

〈スマートフォン画面〉


I. チャットルーム開設


InBody アプリをインストールした登録者に画像または結果用紙や、メッセージを送ることができます。

- * チャットを行う場合、携帯番号の登録が必要です。
- * 測定者は InBody アプリをダウンロードして、個人情報を登録する必要があります。
- * LookinBody Web に登録している携帯番号と InBody アプリに登録している携帯番号が一致していないとチャットルームを開設することはできません。

スタッフからチャットルームを開設する場合

1. ログイン画面よりスタッフアカウントでログインします。

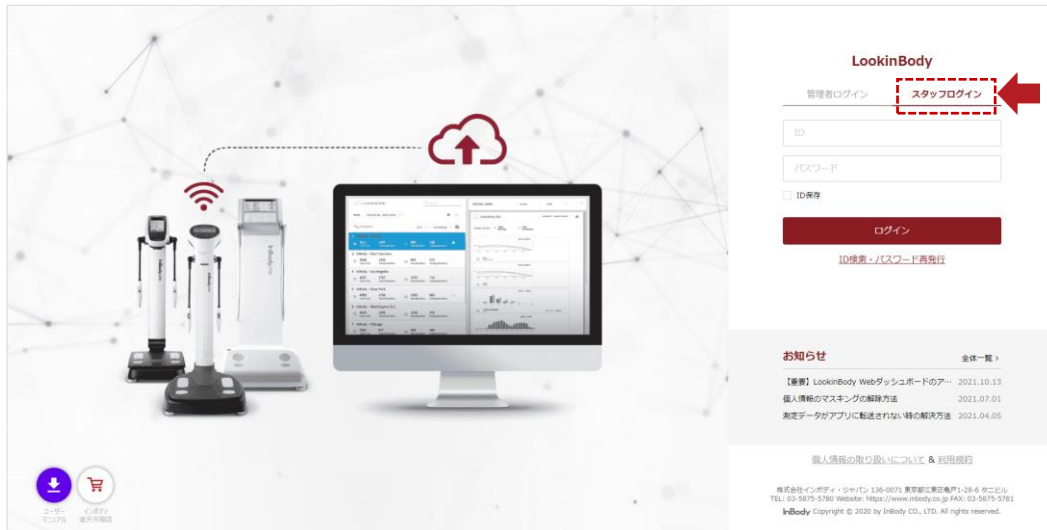

2. [登録者一覧]から  アイコンを選択して、担当スタッフを選択します。

氏名	ID	携帯番号		
sample****	0***	080-*****		




担当スタッフ ?

sample_01

sample_01

3. 選択したスタッフアカウントでログインをし、[チャット]を押すと自動でチャットルームを開設します。

- * チャットを行う場合、携帯番号の登録が必要です。
- * 測定者は InBody アプリをダウンロードして、個人情報を登録する必要があります。
- * LookinBody Web に登録している携帯番号と InBody アプリに登録している携帯番号が一致していないとチャットルームを開設することはできません。

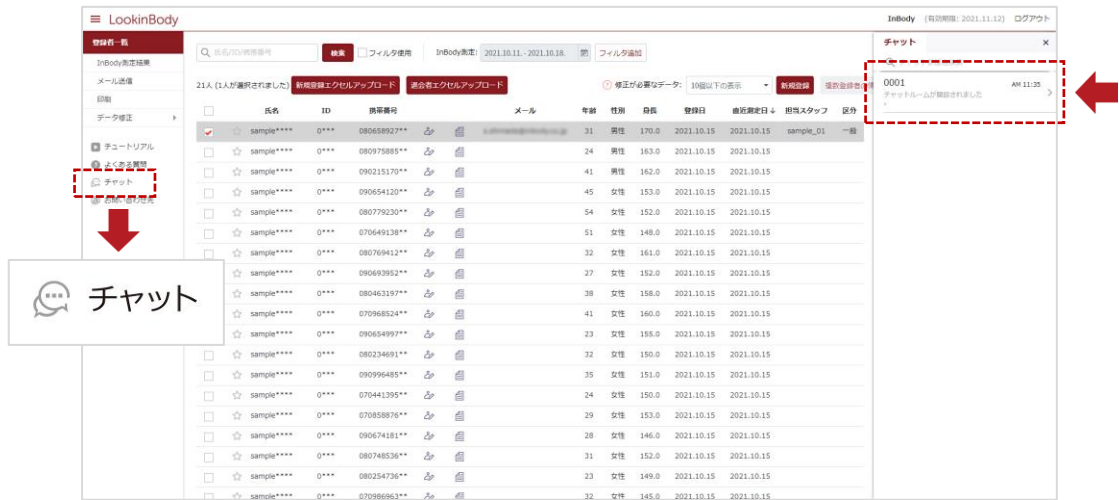

4. 登録者との間にチャットルームが開設され、やり取りができるようになります。



<InBody アプリ画面>




<チャット画面>

[Shift]+[Enter]キーで改行することができます


管理者からチャットルームを開設する場合

1. ログイン画面より管理者アカウントでログインします。

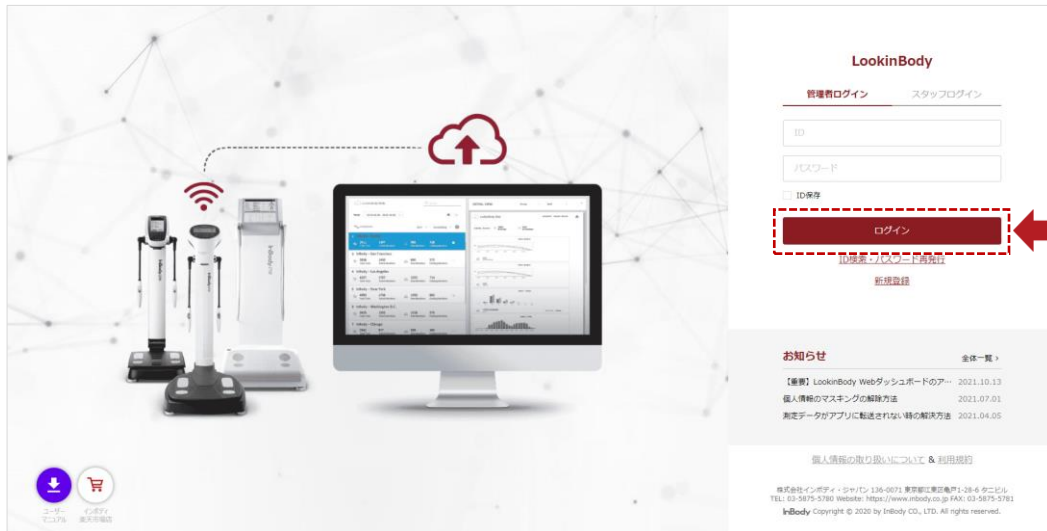


2. [登録者一覧]からチャットを送る登録者を選択します。選択したら🗑️アイコンを選択します。

氏名	ID	登録番号	メール	年齢	性別	身長	登録日	最近測定日	担当スタッフ	区分
sample****	0***	080659927**	sample@inbody.co.jp	31	男性	170.0	2021.10.15	2021.10.15	sample_01	一般
sample****	0***	080975885**		24	男性	163.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	090215170**		41	男性	162.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	090654120**		45	女性	153.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	080779230**		54	女性	152.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	070649138**		51	女性	148.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	080769412**		32	女性	161.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	090693952**		27	女性	152.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	080463197**		38	女性	158.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	070968824**		41	女性	160.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	090654997**		23	女性	155.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	080234691**		32	女性	150.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	090999485**		35	女性	151.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	070441395**		24	女性	150.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	070858876**		29	女性	153.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	090674181**		28	女性	146.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	080748536**		31	女性	152.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	080254736**		23	女性	149.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	070886633**		32	女性	145.0	2021.10.15	2021.10.15		


3. [InBody 測定結果]からチャットで送る項目を選択して  を選択します。

* チャットで送信できる項目は、結果用紙・説明資料・InBody 比較分析・体型写真になります。

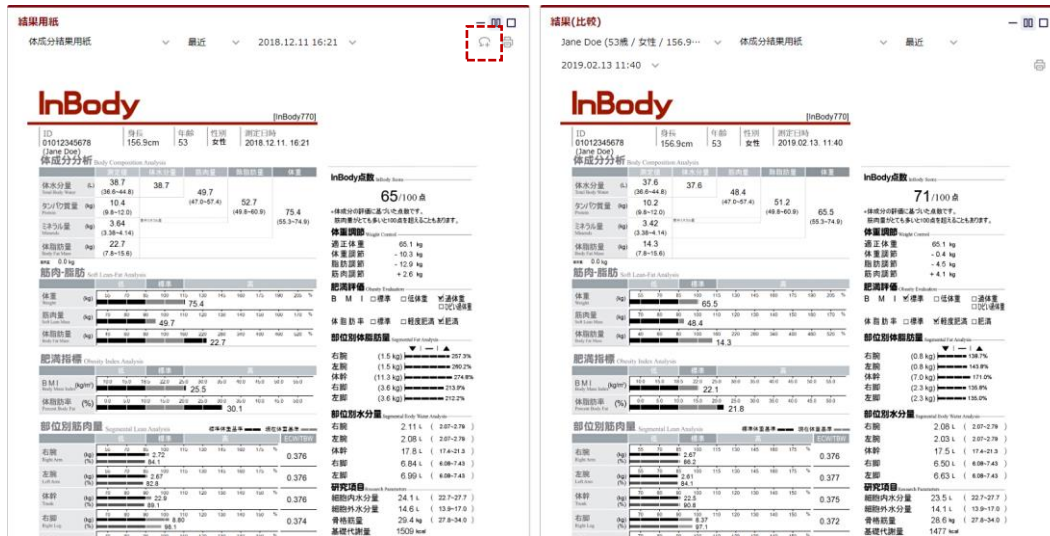

4. 下図の[はい]を選択すると、チャットルームを開設することができ、同時に資料も送ることができます。

* チャットルームを開設したら2回目以降はメニューの[チャット]からやり取りができます。

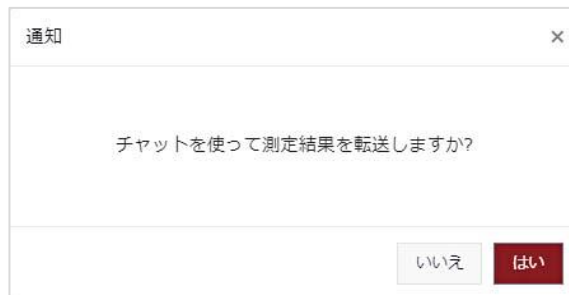

J. 測定データの印刷

登録者の測定データを印刷することができます。

登録者選択

メニューの[登録者一覧]から結果用紙を印刷する登録者を選択してください。

* 1名または複数名まとめて印刷することができます。

氏名	ID	携帯番号	メール	年齢	性別	身長	登録日	最近測定日	担当スタッフ	区分
sample****	0***	080658927**	s.shimada@inbody.co.jp	31	男性	170.0	2021.10.15	2021.10.15	sample_01	一般
sample****	0***	080975885**		24	男性	163.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	090215170**		41	男性	162.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	090654120**		45	女性	153.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	080779230**		54	女性	152.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	070649138**		51	女性	148.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	080769412**		32	女性	161.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	090693952**		27	女性	152.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	080463197**		38	女性	158.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	070968824**		41	女性	160.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	090654997**		23	女性	155.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	080234691**		32	女性	150.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	090996485**		35	女性	151.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	070441395**		24	女性	150.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	070858876**		29	女性	153.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	090674181**		28	女性	146.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	080748836**		31	女性	152.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	080254736**		23	女性	149.0	2021.10.15	2021.10.15		
sample****	0***	070986663**		32	女性	145.0	2021.10.15	2021.10.15		

測定データの印刷

メニューから[印刷]を選択して印刷する結果用紙の種類を選択してください。

名前	ID	種類	詳細
<input type="checkbox"/>	0023	体成分結果用紙	2021.10.15. 14:20 (体重: 78kg, 体脂肪率: 27%)
<input type="checkbox"/>	0023	健康結果用紙	2021.10.15. 14:20 (体重: 78kg, 体脂肪率: 27%)
<input type="checkbox"/>	0023	結果説明結果用紙	2021.10.15. 14:20 (体重: 78kg, 体脂肪率: 27%)

K. 測定データの併合

誤って個人情報重複してしまい、1つのIDに測定したデータをまとめた時に役立ちます。

登録者選択

メニューの[登録者一覧]から測定者を選択します。[データ修正]の[InBody測定]を選択します。

The screenshot shows the LookinBody dashboard with the '登録者一覧' (Registered Users) menu selected. A modal window for 'InBody測定' (InBody Measurement) is open, showing a list of users with checkboxes for selection. A red dashed box highlights the 'InBody測定' option in the modal, and another red dashed box highlights the 'InBody測定' option in the user list. A red arrow points from the modal to the user list.

測定データの併合

メニューの[データ一覧]から測定データを選択して、移動先のIDを入力します。

The screenshot shows the LookinBody dashboard with the 'データ一覧' (Data List) menu selected. A table of measurement data is displayed. A red dashed box highlights the first row of data. Below the table, there are '削除' (Delete) and '完了' (Complete) buttons, with a red dashed box around the '完了' button.

選択	氏名	ID	測定日時	Weight	Lower Limit (Weight Normal Range)	Upper Limit (Weight Normal Range)	TBW (Total Body Water)	Lower Limit (TBW Normal Range)	Upper Limit (TBW No
<input checked="" type="checkbox"/>	sample_4	0019	2011.01.07 20:07:44	70.5	48.5	65.4	33.8	32.0	39.2
<input checked="" type="checkbox"/>	sample_4	0019	2011.01.06 20:10:37	70.8	48.5	65.4	33.7	32.0	39.2
<input type="checkbox"/>	sample_4	0019	2011.01.02 20:22:51	70.5	48.5	65.4	33.9	32.0	39.2

L. パスワードの変更

セキュリティ強化のため、3ヶ月に1回のパスワード変更を推奨しております。パスワードはポップアップ、または[アカウント情報(修正)]より変更することができます。

パスワード変更 ×


前回のパスワード変更より3ヶ月が過ぎました。
セキュリティ強化のために、新しいパスワードの設定を推奨します。

新しいパスワード:

再入力:

The screenshot displays the LookinBody web application interface. On the left is a navigation menu with options like 'ダッシュボード', 'レポート', and 'アカウント情報(修正)'. The main content area shows a 'ようこそ!' (Welcome!) message and a 'パスワード変更' (Change Password) modal window. The modal prompts the user to change their password every 3 months for security. It includes input fields for '新しいパスワード' (New Password) and '再入力' (Re-enter), and 'キャンセル' (Cancel) and '確認' (Confirm) buttons. The background shows the 'アカウント情報(修正)' (Account Information (Edit)) page, which is partially obscured by the modal. The account information page includes fields for 'ID', 'メール' (Email), '現在パスワード' (Current Password), '新しいパスワード' (New Password), '新しいパスワード確認' (New Password Confirmation), '施設名' (Facility Name), '電話番号' (Phone Number), and '住所' (Address).


IV. InBody 測定結果

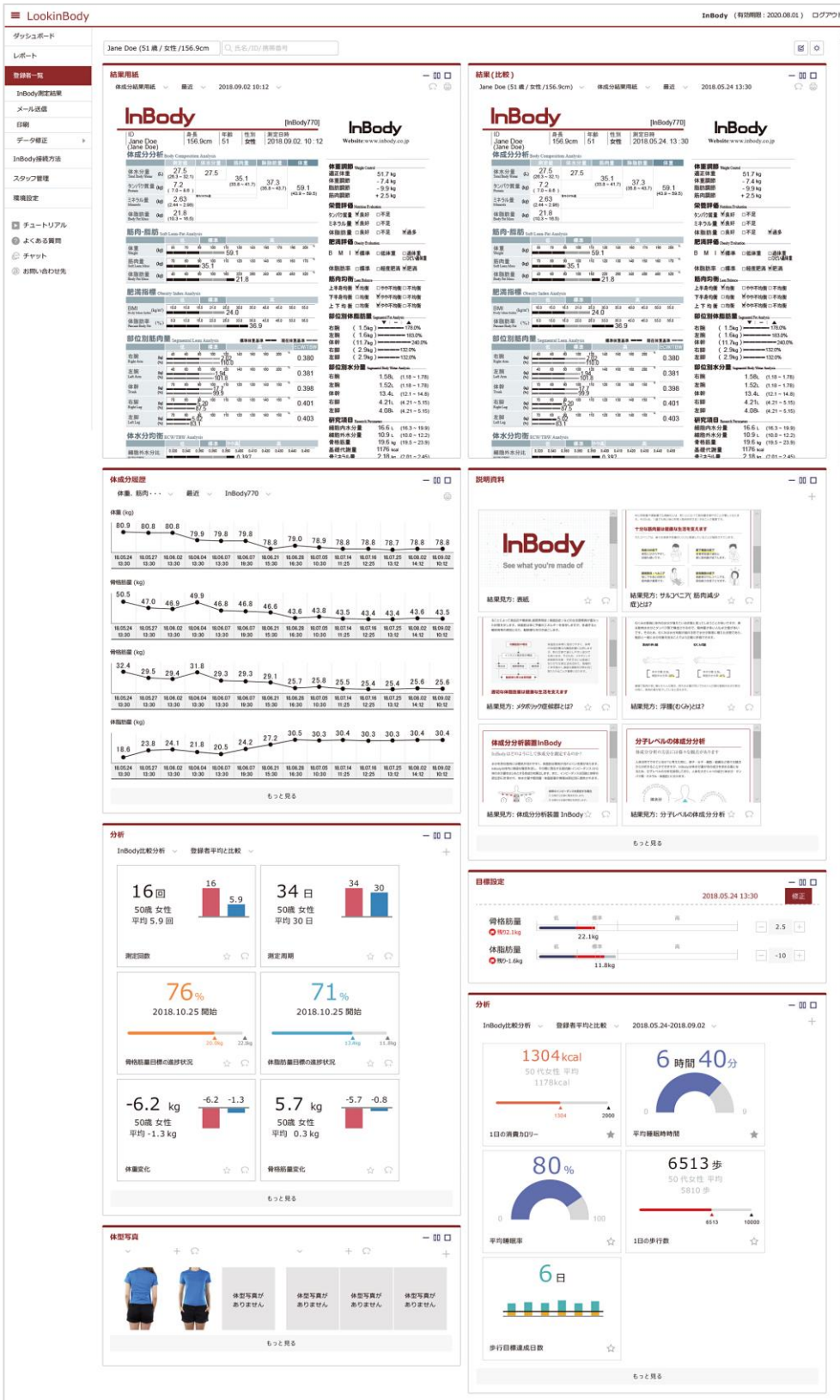

A. InBody 測定結果及び履歴の確認

InBody 測定結果の比較


メニューの[InBody 測定結果]を選択すると、測定日が異なる2つの結果を比較することができます。測定結果を比較しながら、測定者の体成分の変化をより効果的に説明できます。また、このページから結果用紙を印刷・チャット送信することができます。

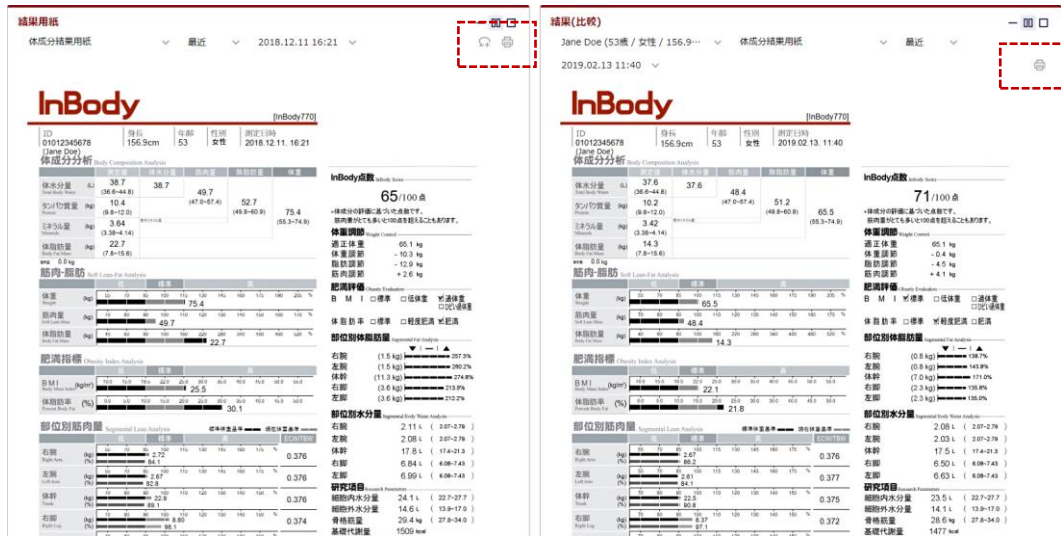

体成分履歴

体成分の変化が折れ線グラフで表示され、印刷することができます。

* 表示項目の変更は、ユーザーマニュアルの35ページをご参照ください。

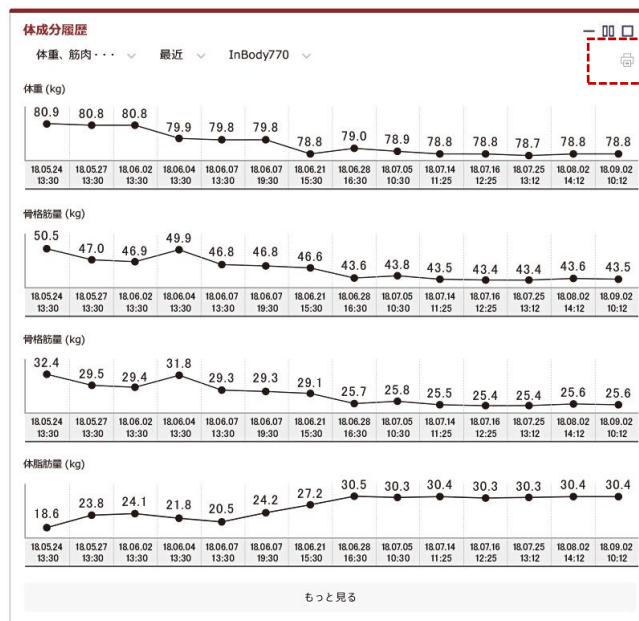


B. 目標設定

目標設定

目標設定は登録者の測定結果を基に、骨格筋量と体脂肪量の目標値を設定することができます。

[修正]を選択すると目標値を調整できます。

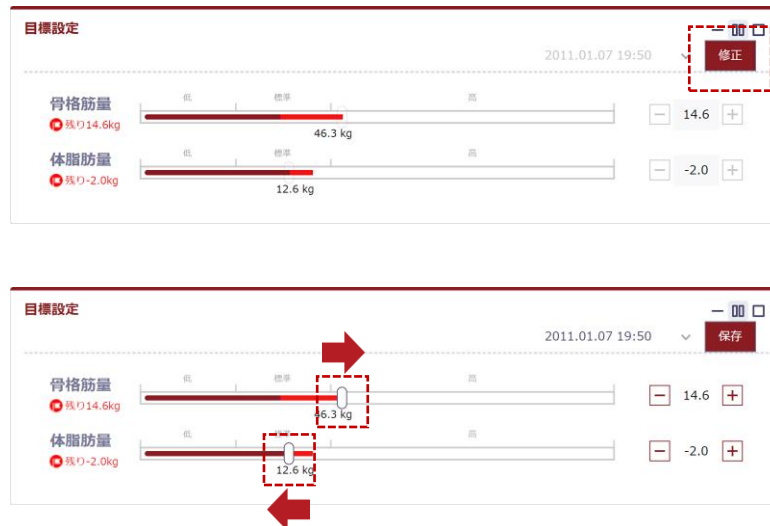

InBody アプリで目標確認

登録者は InBody アプリのチャットルームから設定した目標値を確認することができます。

* チャット送信は管理者・スタッフアカウントのどちらからでも送信できます。



〈InBody アプリ画面〉

C. 説明資料


説明資料の活用

説明資料を活用してスタッフが登録者に InBody の測定結果を説明するときに活用できます。説明資料には年齢別の体成分分布や InBody 測定時の注意事項などがあり、[説明資料]を選択すると、拡大して確認することができます。また、[追加]を選択して、新しい説明資料を直接作成できます。



説明資料のチャット送信

説明資料データの右下にあるチャットアイコンを選択すると、説明資料をチャットで送ることができます。

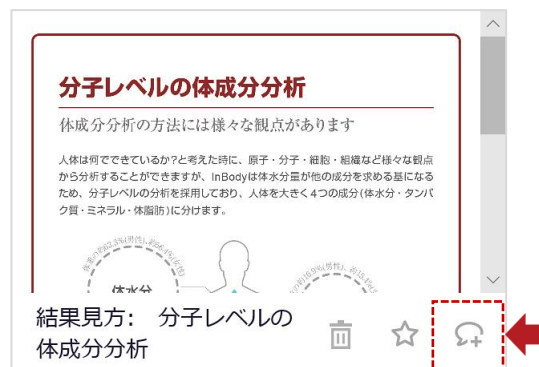

D. InBody 比較分析

InBody 比較分析の活用


登録者の年代や性別などを基準に測定回数・測定周期・骨格筋量目標・体脂肪量目標の進捗状況・体重変化・骨格筋量変化の平均を表示します。平均値と比較して登録者の分析ができます。

- * [登録者平均と比較] アカウントに登録している測定データのみを対象にした分析
- * [InBody 平均と比較] LBWeb を利用している全施設を対象にした分析(日本国内)



InBody 比較分析のお気に入り登録


InBody 比較分析データの右下にある☆アイコンを選択すると、該当データを上段に表示することができます。

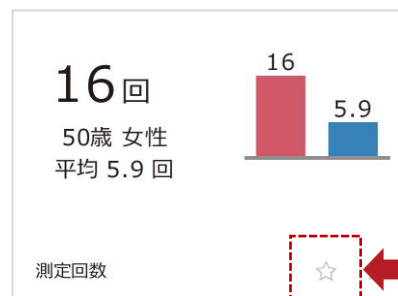

E. メモ機能

メモの活用

メモ機能は測定者の生活習慣や特記事項などを記録します。[InBody 測定結果]の右上にある  アイコンから作成できます。

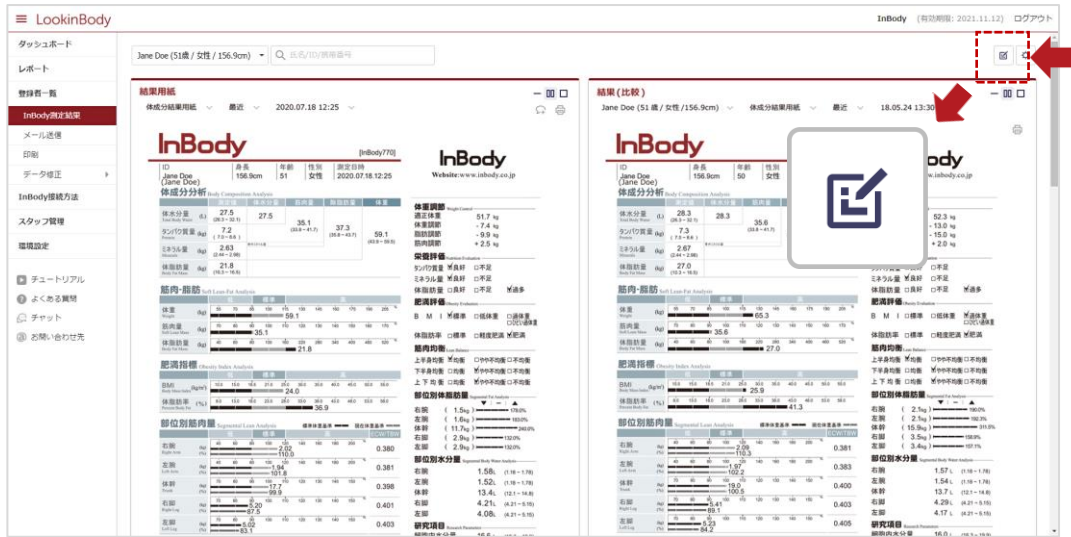

このスクリーンショットは、InBody測定結果の比較画面を示しています。左側の「結果用紙」タブと右側の「結果(比較)」タブが並んでいます。右側のタブの右上隅には、赤い矢印で指し示されたメモ作成アイコン（紙と鉛筆のマーク）があります。



このスクリーンショットは、メモ機能の操作画面を示しています。メモの内容がリストアップされており、右下には「完了」ボタンが赤い矢印で指し示されています。

メモ内容:

- 2件
- 2020.07.13 17:59
腿筋×50回・腕立て伏せ×50回・スクワット×50回
- 2020.07.13 17:58
来年までに体脂肪-3kg!!

メモ追加

完了

F. 測定者の体型写真

体型写真の活用

[体型写真]を活用して登録者の体型の均衡分析及び蛍光ペン機能を用いた相談が可能です。[InBody 測定結果]の[体型写真]で登録した体型写真の前後比較・左右不均衡確認・スタイル分析などに活用できます。体型写真のツールには角度計・蛍光ペン・消しゴムの機能があります。各アイコンを選択すると角度を表示したり、線を描いたりすることができます。




体型写真のチャット送信


体型写真の下にあるチャットアイコンを選択すると、登録者に該当データをチャットで送ることができます。



G. InBody 測定結果の表示項目の設定

InBody 測定結果の表示項目

メニューの[InBody 測定結果]の画面構成はカスタマイズすることができます。画面右上の  アイコンから表示項目の設定ができます。

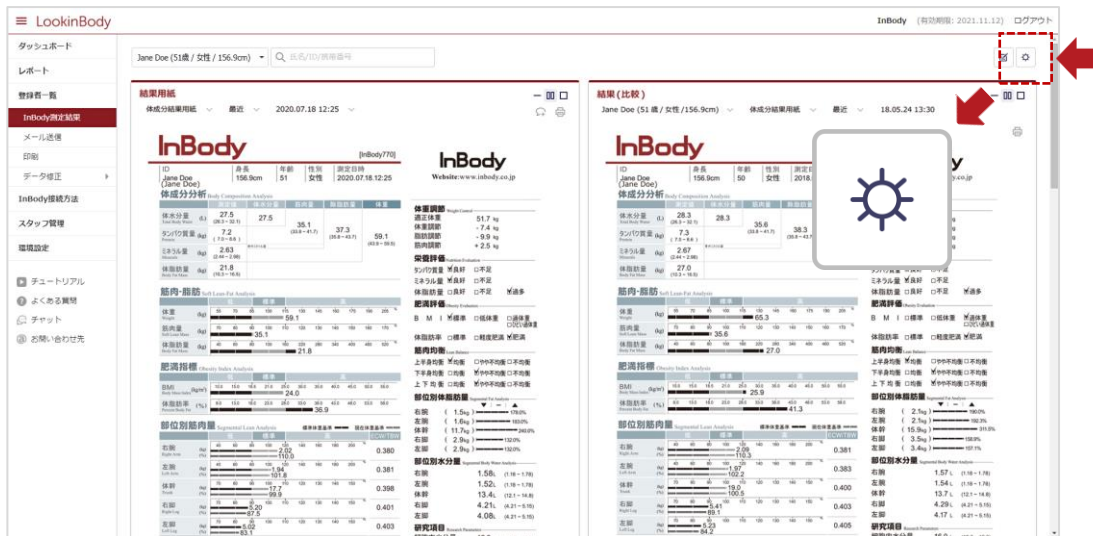

The screenshot shows the InBody measurement results interface. On the right side, a gear icon in the top right corner of the report area is highlighted with a red box and a red arrow, indicating the settings menu. The interface displays two side-by-side reports for Jane Doe (51歳 / 女性 / 156.9cm). The left report is for a measurement on 2020.07.18 12:25, and the right report is for a measurement on 18.05.24 13:30. Both reports show detailed body composition analysis, including body water percentage, muscle mass, and bone mineral content, with various charts and tables.



The '表示項目の設定' (Display Item Settings) dialog box is shown. It has two columns: '非表示' (Hidden) and '表示' (Visible). The '結果(比較)' (Results Comparison) item is currently selected and highlighted. The '完了' (Done) button is highlighted in red.


非表示	表示
<input type="checkbox"/> 結果用紙	<input type="checkbox"/> 体成分履歴
<input checked="" type="checkbox"/> 結果(比較)	<input type="checkbox"/> 説明資料
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 分析
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 目標設定
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 体型写真

Buttons: キャンセル, 完了

V. 測定者及び測定データの集計

A. ダッシュボード

集計したデータを基に、体成分の変化や登録・退会者の推移など施設全体の現状を把握することができます。
 * 集計できる設定期間は最長5年です。

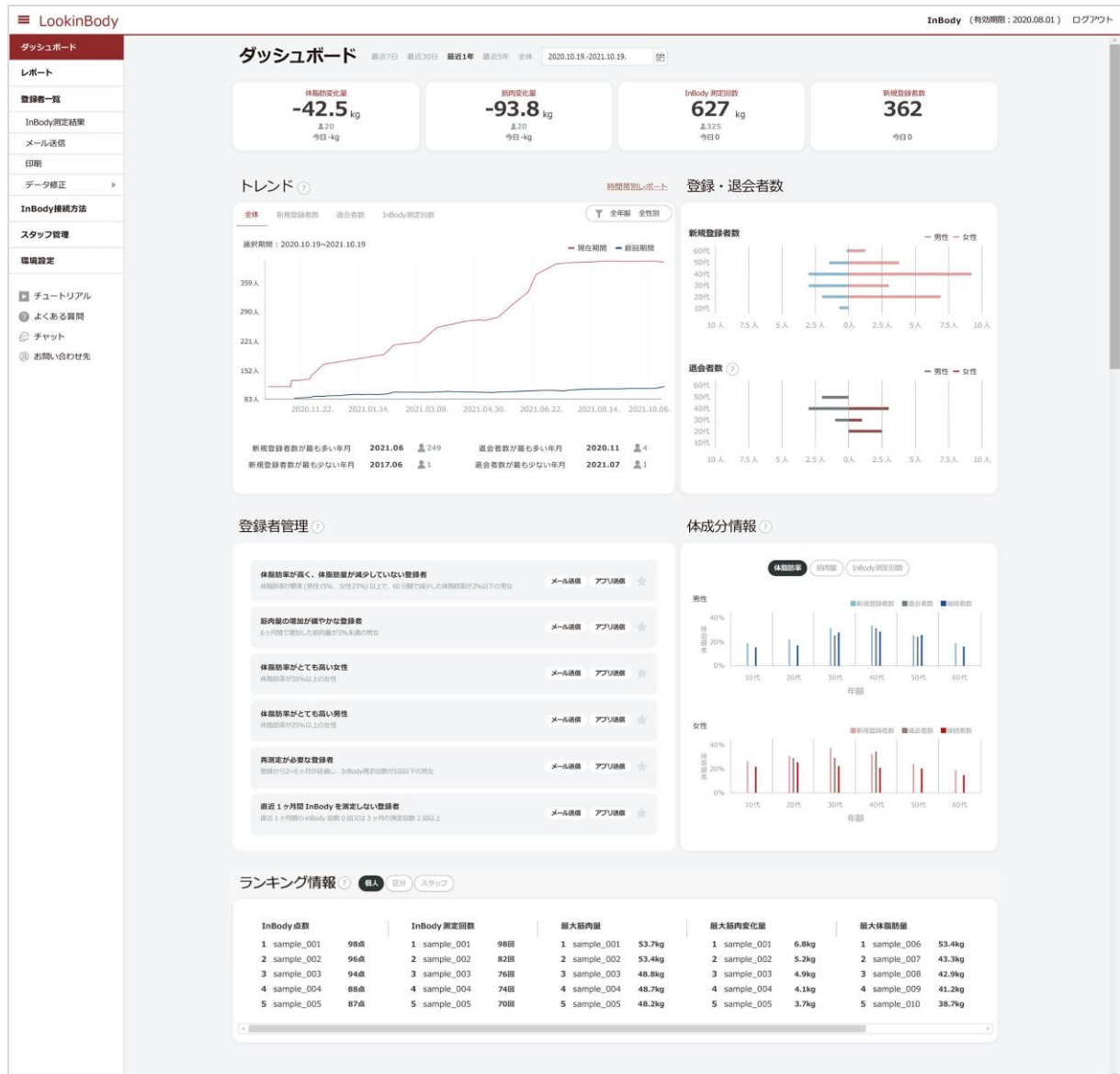

トレンド


新規登録者数・退会者数・InBody測定回数の推移を折れ線グラフで集計することができます。グラフにカーソルを合わせると詳細な件数が表示されます。



登録・退会者数

年代・性別毎の新規登録者数と退会者数を棒グラフで集計することができます。グラフにカーソルを合わせると詳細な件数が表示されます。

* 退会者の登録は、登録者情報を入力したエクセルファイルを LookinBody Web にアップロードする必要があります。(退会者の登録は、P17をご参照ください)

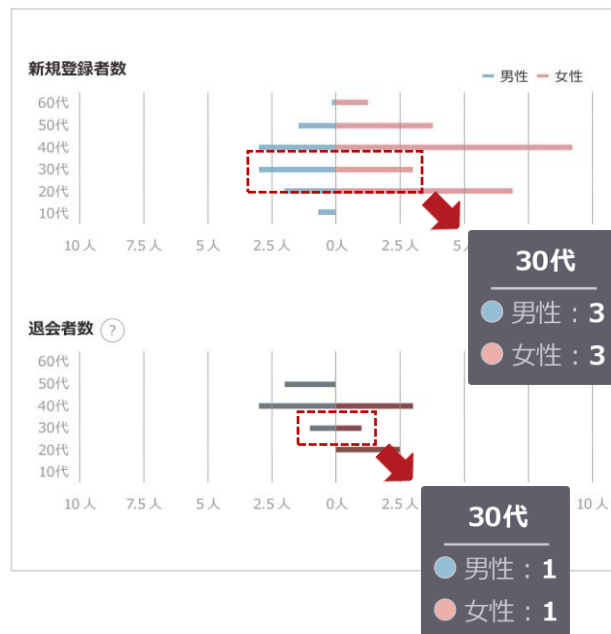

登録者管理

以下の条件に該当する登録者を選択して、メールやアプリからメッセージを送ることができます。

体脂肪率が高く、体脂肪量が減少していない登録者 <small>体脂肪率が標準(男性15%、女性23%)以上で、60日間で減少した体脂肪率が2%以下の男女</small>	メール送信	アプリ送信	★
筋肉量の増加が緩やかな登録者 <small>6ヶ月間で増加した筋肉量が3%未満の男女</small>	メール送信	アプリ送信	★
体脂肪率がとても高い女性 <small>体脂肪率が35%以上の女性</small>	メール送信	アプリ送信	★
体脂肪率がとても高い男性 <small>体脂肪率が25%以上の男性</small>	メール送信	アプリ送信	★
再測定が必要な登録者 <small>登録から2~6ヶ月が経過し、InBody測定回数が1回以下の男女</small>	メール送信	アプリ送信	★
直近1ヶ月間 InBody を測定しない登録者 <small>直近1ヶ月間のinBody回数0回又は3ヶ月の測定回数2回以上</small>	メール送信	アプリ送信	★



体成分情報

体脂肪率・筋肉量・InBody 測定回数の推移を年代・性別毎に分けて棒グラフで集計することができます。グラフにカーソルを合わせると年代別の平均値が表示されます。



ランキング情報

カテゴリ毎(InBody 点数・InBody 測定回数・最大筋肉量・最大筋肉変化量・最大体脂肪量・最大体脂肪変化量)に該当する測定者をランキング形式で表示します。

最大筋肉変化量と最大体脂肪変化量は設定した期間内の中で最後に測定した結果と、設定した期間より前の中で最後に測定した結果の変化量を算出しています。

InBody 点数		InBody 測定回数		最大筋肉量		最大筋肉変化量		最大体脂肪量		
1	sample_1	98点	1 sample_1	98回	1 sample_1	98kg	1 sample_1	98回	1 sample_1	98回
2	sample_2	96点	2 sample_2	82回	2 sample_2	98kg	2 sample_2	82回	2 sample_2	82回
3	sample_3	94点	3 sample_3	76回	3 sample_3	98kg	3 sample_3	76回	3 sample_3	76回
4	sample_4	88点	4 sample_4	74回	4 sample_4	98kg	4 sample_4	74回	4 sample_4	74回
5	sample_5	87点	5 sample_5	70回	5 sample_5	98kg	5 sample_5	70回	5 sample_5	70回

B. レポート

体成分・InBody 点数・測定件数の推移や変化量を折れ線グラフで集計でき、ランキング形式で分析することができます。

* 集計できる設定期間は最長1年です。

LookinBody
InBody (有効期限: 2020.08.01) ログアウト

ダッシュボード

レポート

登録者一覧

InBody測定結果

メール送信

印刷

データ修正

InBody接続方法

スタッフ管理

環境設定

チュートリアル

よくある質問

チャット

お問い合わせ先

ランキングレポート

対象期間: 2020.01.01 ~ 2021.01.02 並び替え 測定回数

区分ランキング スタッフランキング

#	区分	測定回数	体重の推移	筋肉量の推移	体脂肪量の推移	InBody 点数単位
	全ての測定者(32人)	3600	-35.1	36.1	-28.1	18
1	A店舗(82人)	320	-12.5	12.3	-12.1	12
2	B店舗(76人)	304	5.7	5.7	-5.6	8
3	C店舗(72人)	288	-10.5	10.1	-9.8	9
4	D店舗(64人)	256	11.2	-10.8	10.5	10
5	E店舗(60人)	240	8.2	-7.8	7.2	15
6	F店舗(59人)	236	4.5	-3.5	4.2	11
7	G店舗(57人)	228	-6.5	7.0	-7.2	-8
8	H店舗(52人)	208	-4.8	5.2	5.6	-12
9	I店舗(47人)	188	8.9	9.1	-8.0	18
10	J店舗(46人)	184	7.6	-8.1	7.1	8
11	K店舗(40人)	160	6.8	-7.1	6.5	6
12	L店舗(39人)	156	-5.4	6.0	-6.7	-5
13	M店舗(38人)	152	5.5	-6.2	5.0	0
14	N店舗(35人)	140	6.8	-7.8	6.1	-1
15	O店舗(30人)	120	-15.5	14.7	-14.2	-10

ランキングレポートの詳細

区分: 全体 - 全ての測定者 3600人

対象期間: 2020.01.01 ~ 2021.01.02

体成分の推移

対象者数: 380人

体重変化量の合計** **-35.1kg**

筋肉変化量の合計** **-36.1kg**

体脂肪変化量の合計** **-28.1kg**

* 対象者数: 設定した期間中に異なる日付で2回以上 InBody 測定した登録者の人数。
 ** 体成分の変化量: 設定した期間中で体成分の変化した値。


体重の推移

体成分の推移

体重・筋肉量・体脂肪量の変化量をグラフとランキング形式で表示します。

* InBody 測定を 2 回以上行った登録者が集計対象となります。


* 筋肉変化量と体脂肪変化量は、初回測定値と直近測定値を比較した時の変化量を表します。

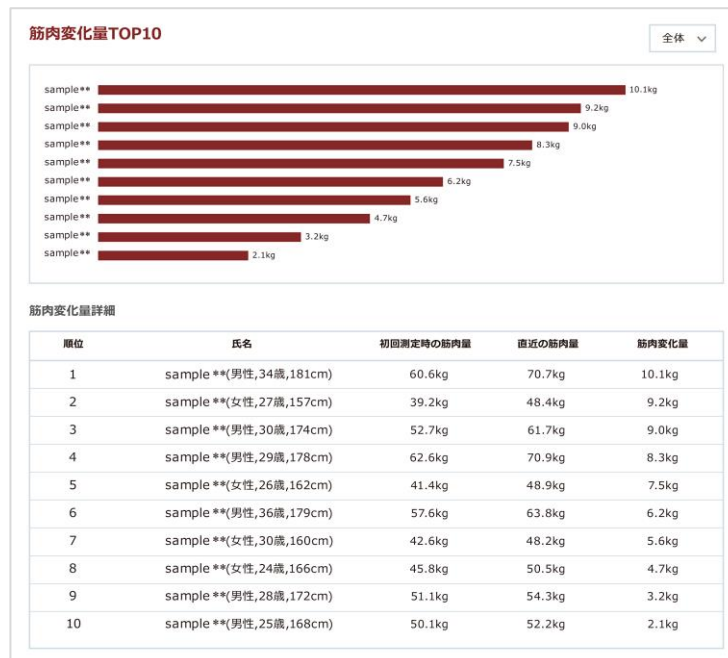

InBody 点数の推移

InBody 点数の変化量をランキング形式で表示します。


* InBody 測定を 2 回以上行った登録者が集計対象となります。

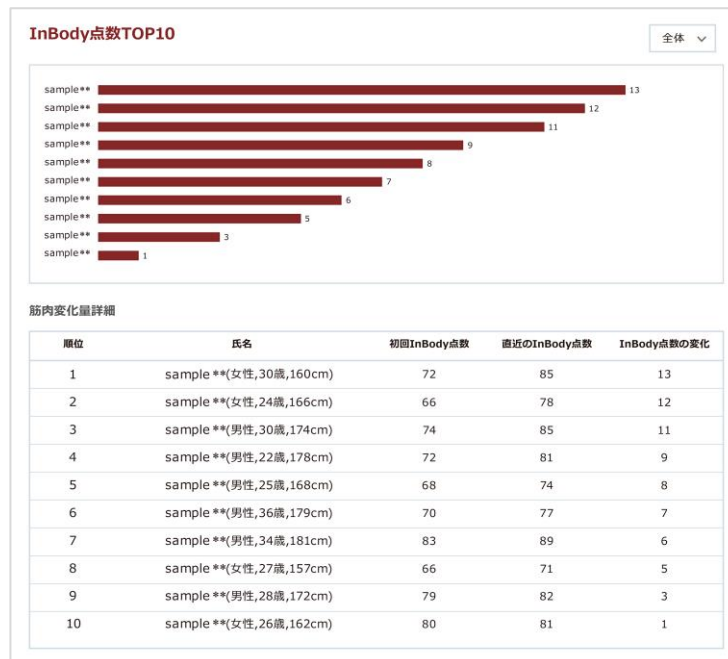

測定回数・測定者数の推移

測定回数・測定者数の変化量をグラフとランキング形式で表示します。


* InBody 測定を 2 回以上行った登録者が集計対象となります。

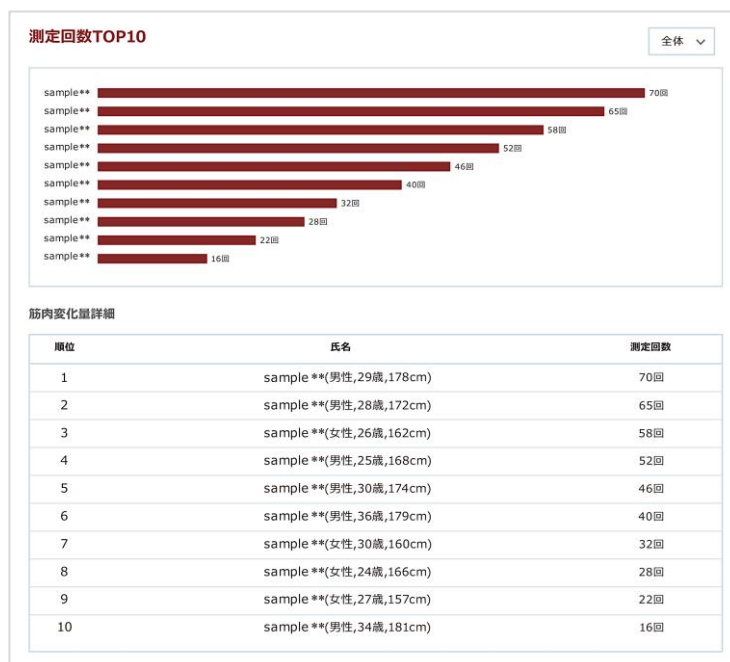

VI. 環境設定

* 環境設定は管理者アカウントにログインすることで設定変更できます。

* N/Aは使用することができません。

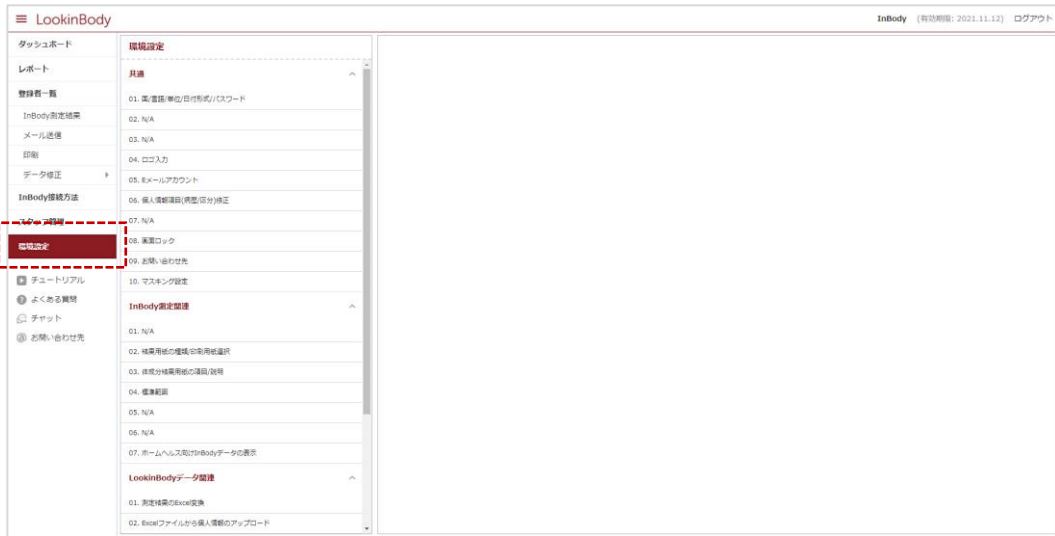

項目	設定内容
共通	
01. 国/言語/単位/日付形式/パスワード	
02. N/A	
03. N/A	
04. ログイン	
05. Eメールアカウント	
06. 個人情報項目(病歴/区分)修正	
07. N/A	
08. 画面ロック	
09. お問い合わせ先	
10. マスキング設定	
InBody測定関連	
01. N/A	
02. 結果用紙の種類/印刷用紙選択	
03. 体成分結果用紙の項目/説明	
04. 標準範囲	
05. N/A	
06. N/A	
07. ホームヘルス向けInBodyデータの表示	
LookinBodyデータ関連	
01. 測定結果のExcel変換	
02. Excelファイルから個人情報のアップロード	
03. N/A	
04. N/A	
05. データのアップロード	
06. 臨時保存データ	
07. LookinBody120データのアップロード	
アカウント設定	
01. ユーザーログの確認	

A. 共通

01. 国/言語/単位/日付形式/パスワード

1. 国: 国を日本に選択してください。
2. 言語: 言語を日本語に選択してください。
3. 単位: 測定結果を表示するときに、使用する単位を選択してください。
4. 日付形式: 測定日を表示するときに、使用する形式を選択してください。
5. 環境設定/パスワードの設定: 環境設定の使用を制限するため、パスワードを設定します。パスワードを設定した後に、[環境設定]ボタンを押すと、パスワードの入力が必要になります。
6. 二重パスワードの設定: データのセキュリティを強化するため、パスワードを設定します。データを Excel 変換するときには、パスワードの入力が必要になります。

国を選択してください。
日本

言語を選択してください。
日本語

単位を選択してください。
 kg/cm lbs./ft.in.

日付表記の形式を選択します。
 年/月/日 月/日/年 日/月/年

下のボタンをクリックしてパスワードを設定します。

環境設定/パスワードの設定 環境設定の使用を制限するためにパスワードを設定します。

二重パスワードの設定 セキュリティを強化するために、二重パスワードを設定します。

保存

04. ログ入力

1. InBody と LookinBody が接続されている状態で、[InBody に保存されているロゴのインポート]ボタンを押すと、ロゴデータをインポートすることができます。

* ログデータの作成を希望される場合、(株)インボディ・ジャパンにお問い合わせください。

就業用途の右上に投稿されるロゴです。

InBody 7/9 (PC713000)

InBody に保存されているロゴのインポート ログ作成 ログを使用しない

プレビュー

InBody
TEL.03-5875-5780 FAX.03-5875-5781

保存

2. [ロゴ作成]ボタンを押すと、LookinBody の画面から文字を直接入力することができます。

就業用途の右上に投稿されるロゴです。

InBody 7/9 (PC713000)

InBody に保存されているロゴのインポート ログ作成 ログを使用しない

プレビュー

InBody
TEL.03-5875-5780 FAX.03-5875-5781

入力

インボディ・ジャパン	Area	10	B
TEL:03-5875-5780	Area	10	B
FAX:03-5875-5781	Area	10	B

保存

05. E メールアカウント

InBody アカウントを選択すると LookinBody Web が提供する E メールアカウントを使用することができ、ユーザアカウントを選択すると、ユーザーが直接自分の E メールアカウント情報を入力できます。

宛定着にメールを送るアカウントを設定することができます。アカウントによって受取人に表示されるメールアドレスが異なります。

1. 使用するアカウントの種類を選択してください。

InBodyアカウント: InBodyより提供されるアカウントからEメールを送ります。
受取人に表示されるメールアドレスは、Lookinbody@inbody.co.jpから変更できません。

ユーザーアカウント: ユーザーメールアドレスにメールを送ります。ホスト/パスワード/ポート/保護接続を設定する必要があります。

2. アカウントの設定に必要な情報を入力してください。

- ・ **ホスト**
* 例: mail.inbody.co.jp
- ・ **ユーザー**
* 例: nonreply@inbody.co.jp
* 受取人に表示されるEメールアドレスです。
- ・ **氏名**
* 例: InBody * 受取人に表示されるEメールアドレスです。
- ・ **パスワード**
- ・ **ポート**
* 例: 587
- ・ **保護接続** 使用する 使用しない

06. 個人情報項目(病歴/区分)修正

登録者を病歴や区分に分けて管理することができます。

病歴 区分

↑ ↓ 閉

08. 画面ロック

画面ロックを設定しておくで、LookinBody Web を使用しない状態で設定時間が経過すると、パスワードを入力する必要があります。

* 画面ロックの設定時間は1分から変更することができます。

画面ロック機能からLookinBodyの使用を制限することができます。
※ LookinBodyを使用しない状態で、設定した時間が経つと画面ロック状態になります。
※ 画面ロックを解除するには、パスワードを入力する必要があります。

画面ロック機能を使用しますか?

使用しない 使用する

LookinBodyを使用しない状態で、画面ロックになるまでの時間を設定してください。

分

画面ロックを解除するためのパスワードを設定してください。

・パスワード

・パスワードの再入力

09. お問い合わせ先

お問い合わせ先の情報を入力しておく、LookinBody Web に不具合が生じたり、不明な点などが見つかったりした際に、すぐに連絡することができます。

お問い合わせ先の情報を入力してください。LookinBodyの使用にお困りの際は、こちらの連絡先までお電話ください。

・会社名	インボディ・ジャパン
・電話番号	03-5875-5780
・ファックス	03-5875-5781
・メール	info@inbody.co.jp
・ホームページ	http://www.inbody.co.jp
・住所	136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル

10. マスキング設定

測定者の氏名・ID の一部分に「*」が使用され、マスキングすることができます。

LookinBody WebでExcel変換したファイルで、氏名・ID・携帯番号がそのまま露出されないように一部を*で表示します。
*でマスキング処理しますか？

はい いいえ

B. InBody 測定関連

02. 結果用紙の種類/印刷用紙選択

1. 結果用紙の選択: 左側のチェックボックスを選択して、印刷する結果用紙の種類を選択してください。
[プレビュー]ボタンを押すと、結果用紙のサンプルが表示されます。
2. 測定結果の印刷用紙: 印刷する結果用紙として、通常の A4 用紙か専用用紙の中から選択してください。
 - * 印刷位置の調節を選択したら、結果用紙に印字される数値やグラフの位置を調節することができます。
 - * 体成分結果用紙以外の結果用紙を印刷する場合、必ず A4 用紙を選択してください。
3. 結果用紙の言語: 結果用紙に印刷される言語を選択することができます。

1. 印刷する結果用紙の種類を選択してください。

選択	結果用紙の種類	結果用紙	結果用紙の説明	サンプル表示	設定	InBody機種
<input checked="" type="checkbox"/>	InBody測定	体成分結果用紙	InBody測定結果をグラフと一緒に表示する結果用紙です。	プレビュー		InBody 770
<input checked="" type="checkbox"/>	InBody測定	小児用体成分結果用紙	分かりやすい説明と小児成長曲線を表示する結果用紙です。	プレビュー	設定	InBody 770
<input type="checkbox"/>	InBody測定	体水分結果用紙	体水分均等及び部位別水分を表示する結果用紙です。	プレビュー		InBody 770
<input type="checkbox"/>	InBody測定	結果説明用紙	体成分結果用紙の結果確認のガイドを提供します。	プレビュー		InBody 770
<input type="checkbox"/>	InBody測定	脂肪結果用紙	体成分脂肪のグラフのように表示する結果用紙です。	プレビュー	設定	InBody 770

2. 印刷する結果用紙の種類を選択してください。

InBody 770

A4用紙: A4用紙に測定結果を印刷します。

専用結果用紙: 専用結果用紙に測定結果を印刷します。

※ 結果用紙に印字される数値やグラフの位置を調節するには、「印字位置調節」ボタンをクリックしてください。 [印字位置調節](#)

3. 結果用紙の言語を選択してください。

InBody機種	言語
InBody 770	日本語

[保存](#)

03. 体成分結果用紙の項目/説明

1. チェックボックスを選択して、体成分結果用紙の右側に印刷される項目/説明を選択することができます。

- * 環境設定の共通[02.結果用紙の種類/印刷用紙選択]で小児用の体成分結果用紙や体水分結果用紙を選択すると、小児用体成分結果用紙と体水分結果用紙の右側の項目/説明も別々に選択することができます。
- * 小児用結果用紙は InBody970/BWA/770/570/470/370S/270、体水分結果用紙は InBody970/BWA/770 が対応しています。

LookinBodyでは異なる機種別のInBody測定結果を表示できます。
但し、機種によって選択できる項目/説明が異なるので、先ず機種を選択してから項目/説明を選択してください。


InBody770

体成分結果用紙と小児用の体成分結果用紙の項目/説明を別々に選択することができます。
項目/説明を選択してください。

体成分結果用紙 小児用の体成分結果用紙 体水分結果用紙

結果用紙の右側に印刷される項目/説明を選択したり、体成分履歴グラフで表示する項目を選択することができます。

1. 結果用紙の右側に印刷される項目/説明を選択してください。
各項目/説明の横に表示されている数字は、項目/説明が占めるスペースを示します。
※選択の際は左側の空きスペースを確認してください。



空きスペース 6

初期設定に戻る

InBody指数(上段表示) 項目 [10]
BIA値・体脂肪率・体水分率など、体成分の状態を示す総合指数です。

体脂肪率 項目 [30]
BMIと体脂肪率に基づいて体脂肪率を評価します。

体脂肪率 項目 [10]
体脂肪率の体成分になるために調整すべき体脂肪率、脂肪の量を提示します。
調整値を表示しない場合、管理側自ら調整値を記載できるように空欄が出力されます。
 調整値を表示する 調整値を表示しない

体重調整部 Weight Control	体重調整部 Weight Control
適正体重 69.9 kg	適正体重
体重調節 -7.0 kg	体重調節
脂肪調節 -7.0 kg	脂肪調節
筋肉調節 0.0 kg	筋肉調節

栄養評価 項目 [9]
タンパク質・ミネラル量・体脂肪率が適切であるか評価します。
チェックを入れない場合、管理側自ら評価してチェックできるように空欄のチェックボックスが出力されます。
 チェックを入れる チェックを入れない

栄養評価 Nutrition Evaluation	栄養評価 Nutrition Evaluation
タンパク質 良好 <input type="checkbox"/> 不足	タンパク質 良好 <input type="checkbox"/> 不足
ミネラル量 良好 <input type="checkbox"/> 不足	ミネラル量 良好 <input type="checkbox"/> 不足
体脂肪率 良好 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 過多	体脂肪率 良好 <input type="checkbox"/> 不足 <input type="checkbox"/> 過多

肥満評価 項目 [9]
BMIと体脂肪率から肥満の程度を評価します。
チェックを入れない場合、管理側自ら評価してチェックできるように空欄のチェックボックスが出力されます。
 チェックを入れる チェックを入れない

肥満評価 Obesity Evaluation	肥満評価 Obesity Evaluation
B MI 標準 <input type="checkbox"/> 低体重 <input type="checkbox"/> 過体重 <input type="checkbox"/> 肥満	B MI 標準 <input type="checkbox"/> 低体重 <input type="checkbox"/> 過体重 <input type="checkbox"/> 肥満
体脂肪率 標準 <input type="checkbox"/> 軽度肥満 <input type="checkbox"/> 肥満	体脂肪率 標準 <input type="checkbox"/> 軽度肥満 <input type="checkbox"/> 肥満

筋肉均衡 項目 [9]
部位の筋肉量に基づいて身体のバランスを評価します。
チェックを入れない場合、管理側自ら評価してチェックできるように空欄のチェックボックスが出力されます。
 チェックを入れる チェックを入れない

筋肉均衡 Lean Balance	筋肉均衡 Lean Balance
上半身均衡 均衡 <input type="checkbox"/> 不均衡 <input type="checkbox"/> 不均衡	上半身均衡 均衡 <input type="checkbox"/> 不均衡 <input type="checkbox"/> 不均衡
下半身均衡 均衡 <input type="checkbox"/> 不均衡 <input type="checkbox"/> 不均衡	下半身均衡 均衡 <input type="checkbox"/> 不均衡 <input type="checkbox"/> 不均衡
上下均衡 均衡 <input type="checkbox"/> 不均衡 <input type="checkbox"/> 不均衡	上下均衡 均衡 <input type="checkbox"/> 不均衡 <input type="checkbox"/> 不均衡

部位別体脂肪率 項目 [14]
身体各部の体脂肪率を分析する項目です。

部位別水分量 項目 [14]
身体各部の水分量を分析する項目です。

部位別細胞内水分量 項目 [14]
部位別に占める、細胞膜の中に存在する水分を分析する項目です。

2. 下図の項目を選択すると、測定結果:InBody]に体成分履歴のグラフが表示されます。

* 表示できる項目は InBody の機種によって異なります。

2. 項目を選択すると、測定結果: InBodyに体成分履歴のグラフが表示されます。

全て選択

体重 筋肉量

骨格筋量 体脂肪量

体脂肪率 細胞外水分比

部位別細胞外水分比 体水分量

細胞内水分量 細胞外水分量

部位別水分量 部位別細胞内水分量

部位別細胞外水分量 タンパク質量

ミネラル量 骨ミネラル量

除脂肪量 部位別筋肉量


下半身筋肉量 BMI

基礎代謝量 ウエストヒップ比

位相角 部位別位相角

SMI 体細胞量

初期設定に戻る

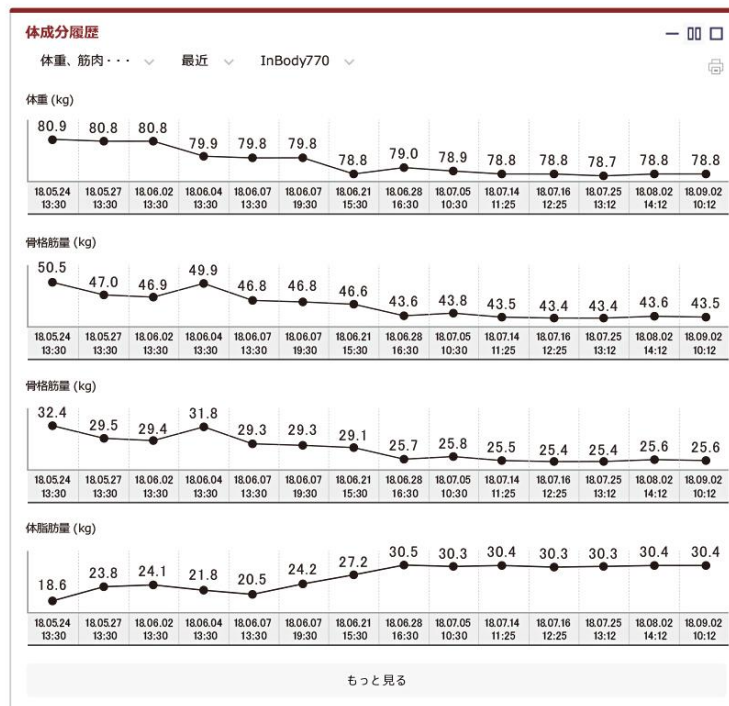

3. 下図の「はい」を選択すると、結果用紙に登録した氏名が印字されます。

3. 結果用紙の上部に個人情報が印字されます。氏名も一緒に印字しますか？

いいえ
 はい

結果(比較)

Jane Doe (53歳 / 女性 / 156.9...)

最近 2019.09.11 16:36

InBody

ID: 01012345678 身長: 156.9cm

(Jane Doe)

体成分分析 Body Composition Analysis

測定値 体水分

4. 下図の項目を選択すると、履歴結果用紙に選択した項目が追加されます。

* 表示できる項目は InBody の機種によって異なります。

4. 履歴結果用紙を印刷すると、体成分履歴グラフが印刷されます。印刷する項目を選択してください。

全て選択

体重
 筋肉量

骨格筋量
 体脂肪量

体脂肪率
 細胞外水分比

部位別細胞外水分比
 体水分量

細胞内水分量
 細胞外水分量

部位別水分量
 部位別細胞内水分量

部位別細胞外水分量
 タンパク質量

ミネラル量
 骨ミネラル量

除脂肪量
 部位別筋肉量


下半身筋肉量
 BMI

基礎代謝量
 ウエストヒップ比

位相角
 部位別位相角

SMI
 体細胞量

初期設定に戻る

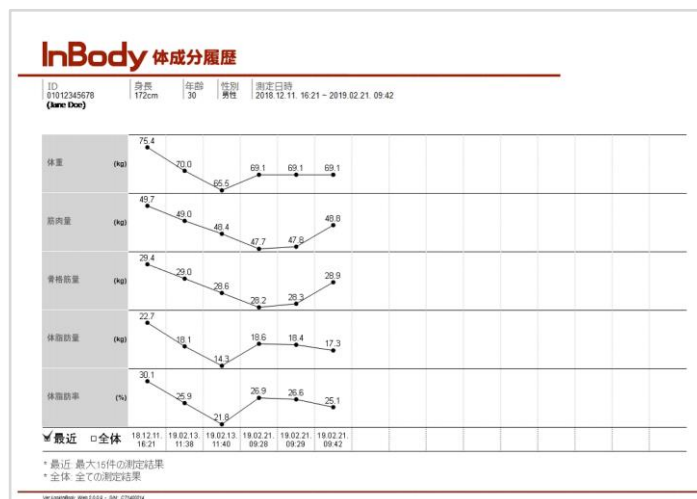

04. 標準範囲

1. BMI 標準範囲・標準値: BMI 標準範囲と標準値を選択してください。BMI 標準範囲は、直接入力するオプションが選択できます。
2. 体脂肪率の標準範囲: 体脂肪率の標準範囲を直接入力して設定することができます。
3. ウエストヒップ比の標準範囲: ウエストヒップ比の標準範囲を直接入力して設定することができます。
4. 小児成長標準曲線: 小児用の体成分結果用紙を印刷する場合、その結果用紙の成長曲線項目に使用される小児成長標準曲線を選択してください。
 - CDC-2000: CDC が定めている小児成長曲線です。
 - WHO2007: WHO が定めている小児成長曲線です。
 - 日本: 日本文部科学省が発表している小児成長曲線です。

標準範囲を設定すると、該当する項目のグラフが設定した標準範囲に従って提示されます。

標準範囲/標準値

標準範囲

標準値

BMI (kg/m²)

標準範囲

オプション 1 (18.5 ~ 25.0) * 世界保健機関(WHO)で定めた範囲

オプション 2 (18.5 ~ 23.0) * アジア人の成人を基準に定めた範囲

オプション 3 18.5 ~ (Min 23.0 / Max 29.0)

標準値 (BMIの標準値が変わると、体重の標準値も一緒に変わります。)

オプション 1 男性 22 / 女性 21.5

オプション 2 男性 22 / 女性 21

体脂肪率 (%) (体脂肪率の標準値は男性15%、女性23%です。)

標準範囲

男性: ~ 女性: ~

(Min 5.0 / Max 34.0) ~ (Min 18.0 / Max 50.0) (Min 5.0 / Max 22.0) ~ (Min 24.0 / Max 50.0)

ウエストヒップ比 (ウエストヒップ比の標準値は正常範囲の中間値として自動計算されます。)

標準範囲

男性: ~ 女性: ~

(Min 0.5) (Max 1.5) (Min 0.5) (Max 1.5)

小児成長標準曲線


小児用の体成分結果用紙に表示されるグラフであり、身長と体重を用年別の小児と比較することで成長程度を確認できます。
小児成長標準曲線の種類によって比較対象が異なります。

小児成長曲線の基準を選択してください。 BMI

CDC-2000

WHO 2007

日本



保存

07. ホームヘルス向け InBody データの表示

ホームヘルス向け製品の測定データを表示できます。

* InBodyBAND や InBody Dial などホームヘルス向け製品のデータを確認するには、登録者にアクセス権を要請して同意を得る必要があります。

* アクセス権を要請すると、登録者に InBody アプリ経由でアクセス権を求めるメッセージが通知されます。

ホームヘルス向けInBodyのデータをLookinBodyで表示しますか?

表示

表示しない

* ホームヘルス向けInBodyのデータを閲覧するには、指定IDの登録者がご自身のアプリでデータの開示を許可する必要があります。

保存

C. LookinBody データ関連

01. 測定結果の Excel 変換

LookinBody Web に保存されているデータを Excel ファイルに変換して、保存することができます。

- * 区分: [個人情報項目(病歴/区分)修正]から追加した項目毎の測定結果をExcel変換します。
- * 担当: スタッフを選択すると、担当している登録者の測定結果のみをExcel変換します。

LookinBodyに保存されているデータをExcelファイルに変換し、パソコンで編集することができます。

データ種類	InBody測定
期間	2020-06-13 ~ 2020-07-13
区分	全体
担当	全体

データをExcelファイルに変換するには、下記のボタンをクリックしてください。

Excelファイルに変換

1. ログイン時と同じパスワードを入力して[確認]を選択します。


Lookinbody

セキュリティのため、ログイン時のパスワードを入力してください。

パスワード:

確認

2. ブラウザ画面の下端に、Excel データが表示されるので選択してください。

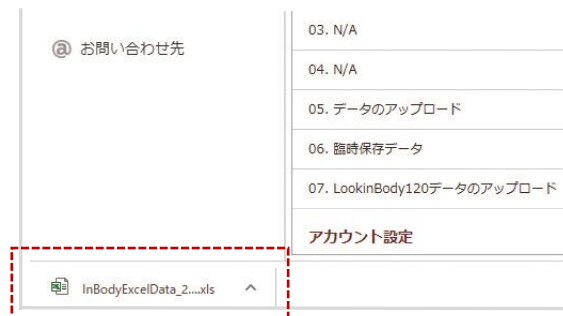

02. Excel ファイルから個人情報のアップロード

個人情報を Excel ファイルに入力してからアップロードすると、複数の測定者をまとめて登録することができます。

1. [LBGroupRegistration.xls 保存]ボタンを押してください。

* 個人情報のアップロードは[登録者一覧]の[新規登録エクセルアップロード]と同じ手順で登録できます。

LookinBodyから提供するExcelファイルを利用して、複数の個人情報を一度に登録することができます。
LookinBodyは付属のExcelファイルに照ってデータをアップロードすることができます。

1. 次の手順に従って、LookinBodyが提供するExcelファイルにデータを入力してください。

1) 下のボタンをクリックすると、付属のExcelファイル(LBGroupRegistration.xls)がブラウザ画面の下段に保存されます。

LBGroupRegistration.xls保存

2) ブラウザ画面の下にあるLBGroupRegistration.xlsを開いてください。
 3) ファイル内のヘルプを参考にして個人情報を入力してください。
 4) ファイルをデスクトップ保存して閉じてください。

2. 下のボタンをクリックし、作成したLBGroupRegistration.xlsファイルを選択してアップロードしてください。

ファイルを選択してください。

ファイル選択

LBGroupRegistration.xlsアップロード

2. 画面の左下に Excel データが表示されるので、選択してください。



* [LBGroupRegistration.xls]は下記のような形式になります。

* Microsoft Excel 2003から2019まで対応します。それ以外のバージョンでは、[LBGroupRegistration.xls]は開けません。

* 個人情報を入力する際は、必ず「例」を参考にしてください。

* 個人情報(必須)項目は、全て入力してください。

* IDが重複しないように入力してください。

* IDは半角の英数字のみで入力してください。(1~14文字)

エクセルファイルインポート							
下記の内容を参考に、個人情報を入力してください。							
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 必ずこの形式に従って個人情報を入力してください。様式を変更すると、インポートができなくなります。 ▶ 「例」を参考にし、「入力」の下段から情報を入力してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 個人情報(必須)項目は、全て入力してください。 ・ IDが重複しないように入力してください。 ・ IDは半角の英数字のみで入力してください。(1~14文字) 							
例							
個人情報(必須)						個人情報(任意)	
氏名	ID	身長	性別(男性:M, 女性:F)	生年月日	年齢	携帯電話	電話
テスト	test	176.0	M	1990.02.18.	23	09012345678	0301235678
入力							
個人情報(必須)						個人情報(任意)	
氏名	ID	身長	性別(男性:M, 女性:F)	生年月日	年齢	携帯電話	電話
サンプル1	sample_1	155.2	F	1990.10.01.	29		
サンプル2	sample_2	180.6	M	1985.07.24.	34		
サンプル3	sample_3	175.5	M	1970.01.15.	49		
サンプル4	sample_4	170.2	M	1968.05.23.	51		
サンプル5	sample_5	161.0	F	1995.03.04.	24		
サンプル6	sample_6	159.6	F	1992.08.29.	27		
サンプル7	sample_7	185.0	M	2000.02.19.	19		
サンプル8	sample_8	149.5	F	1953.09.04.	66		

3. 作成したファイルを[LBGroupRegistration.xls アップロード]ボタンを押して読み込むと、個人情報のアップロードが開始されます。

LookinBodyから提供するExcelファイルを利用して、複数の個人情報を一度に登録することができます。
LookinBodyは付属のExcelファイルに限定してデータをアップロードすることができます。

1. 次の手順に従って、LookinBodyが提供するExcelファイルにデータを入力してください。

1) 下のボタンをクリックすると、付属のExcelファイル(LBGroupRegistration.xls)がブラウザ画面の下端に保存されます。

LBGroupRegistration.xls保存


2) ブラウザ画面の下にあるLBGroupRegistration.xlsを開いてください。
3) ファイル内のヘルプを参考にして個人情報を入力してください。
4) ファイルをデスクトップ保存して閉じてください。

2. 下のボタンをクリックし、作成したLBGroupRegistration.xlsファイルを選択してアップロードしてください。

ファイルを選択してください。 ファイル選択

LBGroupRegistration.xlsアップロード

4. 個人情報のアップロードが完了したら、下図のようなポップアップアイコンが表示されます。

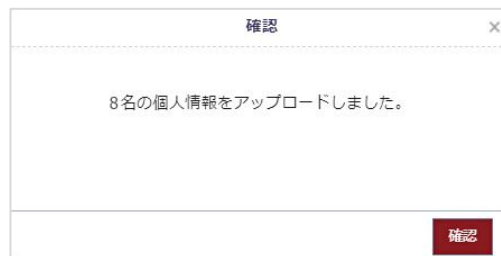

05. データのアップロード

InBody 本体の[07.測定結果のコピー]から USB メモリーに保存されたデータをアップロードして、LookinBody Web に保存することができます。


InBody本体の「07. 測定結果のコピー」からUSBメモリーに保存されたデータをアップロードする方法

- 1) 下段の「ファイル選択」ボタンを選択してください。
- 2) InBodyデータを保存したUSBメモリーを選び、「inbody」→「lookinbody」の「newcommondb.enc」ファイルを選択してください。
- 3) 「データアップロード」ボタンを押してください。


ファイルを選択してください。

※ データアップロードの処理に最大15分かかる場合があります。15分以上経過したら、このウィンドウを閉じて、登録者一覧からアップロードした登録者のデータを確認してください。


1. パソコンに差し込んでいる USB メモリーを選択して、[lookinbody]のフォルダを選択してください。

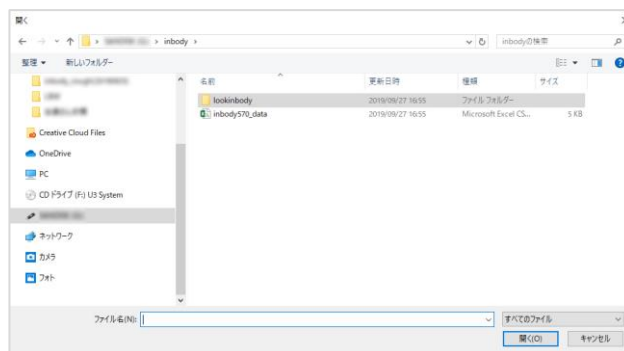

2. フォルダ内の[newcommondb.enc]を選択して、[データアップロード]を選択してください。

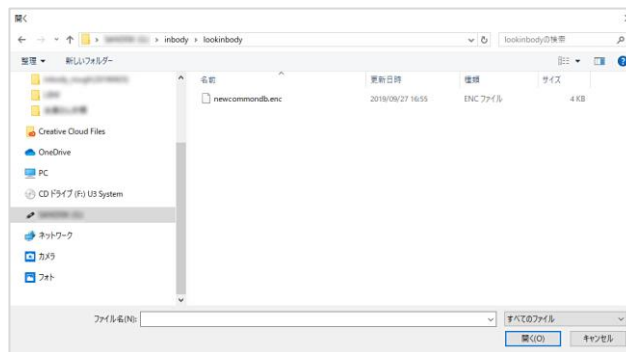

3. データのアップロードが完了したら、[登録者一覧]から正しくアップロードされているか確認してください。

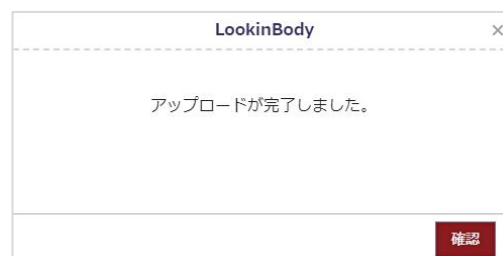

06. 臨時保存データ

測定結果を LookinBody Web に保存するため、必要な情報が全て入力されていない臨時保存データを確認することができます。必須情報を全て入力してから保存すると、LookinBody Web に測定結果が保存され、測定結果から確認することができます。

臨時に保存されたデータです。LookinBodyに結果を保存するには

- 身長、生年月日(または年齢)、性別を確認し、IDを入力してください。
- 左側のチェックボックスを選択して、下の「保存」ボタンをクリックしてください。

※ InBody本体から性別を入力せずに測定した場合、LookinBodyで入力しても個人情報のみが保存されます。
※ 臨時保存されたデータを削除するには、左側のチェックボックスを選択し、右上の「削除」ボタンをクリックしてください。

選択 <input type="checkbox"/>	氏名	ID	携帯番号	身長 (cm)	生年月日、または年齢			性別	InBody測定日時	
					生年月日					年齢
					年	月	日			
<input type="checkbox"/>				182.0	1992	01	01	28	男性	2020.07.07 18:59:25

07. LookinBody120 データのアップロード

LookinBody120 で管理していた個人情報や測定データを、LookinBody Web にアップロードすることができます。

* 測定データをアップロードするには、対象となる測定者に当社が取り扱う個人情報について同意していただく必要があります。

* 詳細につきましては、(株)インボディ・ジャパンまでお問い合わせください。

以前に使用した旧LookinBodyに保存されているデータを読み込んで、LookinBody Webに保存することができます。

※ 旧LookinBodyはLookinBody120のデータのみがアップロードできます。

※ 既存データをクラウドサーバーに移行するには、対象となる登録者全体が当社が取り扱う個人情報について同意する必要があります。全ての登録者から同意を得ていますか?

はい いいえ

1) 下の「ファイル選択」ボタンをクリックして、パソコンのLookinBody120フォルダを選択し、「DataBase」フォルダにある「LookinBody.mdb」を選択してください。
※ C:\LookinBody120*Database

2) 下の「データアップロード」ボタンをクリックしてください。

D. アカウント設定

測定環境に合うように、設定変更やデータを管理できます。

01. 二段階認証

第三者による不正ログインの防止に有効で、より安全にログインすることができます。


二段階認証を設定しますか?
※ 二段階認証は管理者アカウントとスタッフアカウントの両方に適用されます。

はい
 いいえ

保存

ログイン時に「ログイン ID とパスワード」による認証に加え、一定時間だけ有効な「認証番号」の入力が必要になります。メールアドレス宛に送信される「認証番号」をアカウント画面に入力して本人確認を行います。

* 認証番号は 20 分間有効になります。

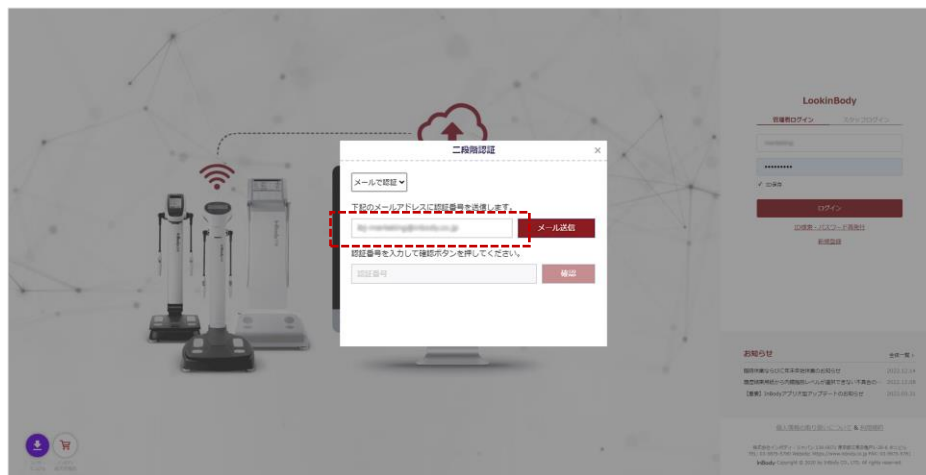

02. ユーザーログの確認

LookinBody Web にログインした日時を確認できます。

アカウント	ログ日付
sample1	21.10.18

全体 (57)				
日付	IP	アカウントID	アクション	アクションタイプ
2021-10-18 16:50:06	153.142.219.213:60409	sample1	GetUserList	SELECT
2021-10-18 16:49:21	153.142.219.213:60409	sample1	GetAgeFromBirthDay	SELECT
2021-10-18 16:44:12	153.142.219.213:60409	sample1	GetAgeFromBirthDay	SELECT
2021-10-18 16:44:08	153.142.219.213:60409	sample1	GetUserList	SELECT
2021-10-18 16:43:13	153.142.219.213:60409	sample1	GetUserList	SELECT
2021-10-18 16:42:52	153.142.219.213:60409	sample1	GetUserList	SELECT
2021-10-18 16:32:55	153.142.219.213:60409	sample1	GetUserList	SELECT
2021-10-18 16:21:16	153.142.219.213:60409	sample1	GetUserList	SELECT
2021-10-18 16:21:13	153.142.219.213:60409	sample1	GetAgeFromBirthDay	SELECT
2021-10-18 16:21:11	153.142.219.213:60409	sample1	GetUserList	SELECT
2021-10-18 16:21:09	153.142.219.213:60409	sample1	GetAgeFromBirthDay	SELECT

VII. よくある質問

ここで質問に対する答えが見つからない場合は、(株)インボディ・ジャパンまでお問い合わせください。

A. 接続に関して

質問	回答
<ul style="list-style-type: none">LookinBody Web と InBody の接続方法を教えてください。	<ul style="list-style-type: none">InBody と LookinBody Web を接続する場合、ネットワークの接続が必要になります。接続方法はユーザーマニュアルの 8～9 ページをご参照ください。
<ul style="list-style-type: none">1 つのアカウントで 2 台以上の InBody を使用することができますか。	<ul style="list-style-type: none">追加でご契約していただくことで 2 台以上の InBody と連動することができます。詳細はユーザーマニュアルの 47 ページをご参照ください。
<ul style="list-style-type: none">測定中に通信が切断されたら、測定結果はどうなりますか。	<ul style="list-style-type: none">ネットワークの状態が回復したら自動的にクラウドにデータが反映され、アプリでデータを確認することができます。
<ul style="list-style-type: none">InBody の画面右上に表示される雲のマークで、「LB」と表示される場合と、されない場合があります。	<ul style="list-style-type: none">InBody の画面右上に表示されるアイコンが雲のマークのみの場合(LB が表示されない場合)、LookinBody Web に正しく接続されていない状態を表しています。測定データを LookinBody に転送するには、雲マークに「LB」と表示された状態にする必要があります。雲マークに「LB」と表示されない場合、下記の内容をご確認ください。InBody 本体の管理者メニューから「04.クラウドサービス」を選択し、LookinBody ウェブサイトサイトとアカウントログインにチェックマークを入れて保存してください。
<ul style="list-style-type: none">InBody がネットワーク(インターネット)に接続していない状態で、InBody を測定をしても問題ありませんか。	<ul style="list-style-type: none">InBody はネットワーク(インターネット)に接続していない状態でも測定できますが、個人情報は自動的に参照されないため、再入力する必要があります。測定後はネットワークに再接続すると、LookinBody Web と InBody アプリに測定データが自動で転送されます。
<ul style="list-style-type: none">InBody を LookinBody Web に接続しようとしたら、「エラーコード 0014 (0006)」と表示され、設定ができません。	<ul style="list-style-type: none">エラーコード 0014(0006)は、InBody が既に他の LookinBody Web のアカウントに登録されているために表示されるコードです。新しいアカウントで LookinBody Web のご利用を希望する場合は、LookinBody Web のカスタマーサービスにお問い合わせください。

B. 登録に関して

質問	回答
・携帯番号を適当に入力しても問題ありませんか。	・測定データは、携帯番号でサーバーとリンクしているため、正しく入力する必要があります。 * アプリを使用しない場合、携帯番号の入力を省略しても問題ありません。 * InBody アプリに登録できる携帯番号は060・070・080・090 で始まる番号のみです。
・LookinBody Web の管理画面で測定者情報を削除した場合、アプリ側にも反映されますか。	・管理画面から測定者情報を削除しても、アプリのデータは閲覧できます。 * データを完全に削除するには管理画面とアプリの両方から削除する必要があります。
・LookinBody Web の契約期間を延長するにはどうすればいいですか。	・契約期間が切れる 30 日前になると、使用期間延長の案内が管理画面に表示され、支払い方法を選択してライセンスを延長することができます。 * 予め有効期間の延長を希望の方は(株)インボディ・ジャパンまでお問い合わせください。
・LookinBody Web を解約することはできますか。	・途中解約を希望する場合、月割りの計算で払戻しとなり、1 ヶ月に満たない日数は1 ヶ月に繰り上がります。また、解約事務手数料として、3,000 円(税抜)を払戻し金額から差し引かさせていただきます。
・LookinBody Web に登録した施設名を変更することはできますか。	・施設名を変更することができます。施設名の変更をご希望の場合はLookinBody Web カスタマーサービスにお問い合わせください。
・測定時に ID を入力すると個人情報が自動表示されますが、この情報は InBody と LookinBody Web のどちらから参照されますか。	・LookinBody Web の個人情報から参照されます。

C. データに関して

質問	回答
・アプリで測定結果で見れません。	・LookinBody Web に登録している携帯番号と、アプリに登録している携帯番号が一致しているか確認してください。
・アプリで結果用紙が表示出来なくなりました。	・LookinBody Web の有効期限が過ぎると、アプリで結果用紙を閲覧する機能が制限されます。ライセンスの購入または契約期間を延長すると、結果用紙を閲覧することができます。
・InBody アプリをインストールしている登録者が携帯番号を変更した場合、データを引き継ぐ方法がありますか。	・下記の手順を行うことで携帯番号を変更しても、データの引き継ぎができます。 ・1.登録者は InBody アプリの[環境設定]→[個人情報]→[携帯番号]→[携帯番号変更]から新しい携帯番号に変更します。2.管理者は LookinBody Web から登録者を検索して、個人情報を新しい携帯番号に変更します。 * 1~2 の手順を両方行わないと、InBody アプリで測定データを確認することができません。
・登録者がスマートフォンを機種変更した場合、InBody アプリで測定結果を引き継ぐことはできますか。	・スマートフォンを機種変更しても、InBody アプリで測定結果を引き継ぐことができます。測定データはクラウドサーバーに保存されるので、新しいスマートフォンに InBody アプリをインストールして、既存の携帯番号を登録することで、測定結果の引き継ぎができます。

VIII. 利用金額及び決済方法

A. ライセンスの延長

アカウントの有効期限が残り30日になると、下図のようなポップアップが表示されます。継続してご利用する場合は、ライセンス券の購入をしてください。



注文書要請(メール)

[注文書要請(メール)]を選択すると、下図のポップアップが表示されます。ご希望の契約期間を選択して[確認]ボタンを押すと、見積書依頼が株式会社インボディ・ジャパンに送信されます。その後担当より注文書をお送りいたします。



ネット支払い(楽天)

[ネット支払い(楽天)]を選択すると、インボディ楽天市場店のページに移動します。ご希望の契約期間を選択して購入をしてください。

ライセンス券のご案内	
	
契約料金(12ヶ月) 36,000円(税抜)	契約料金(6ヶ月) 18,000円(税抜)
利用可能 InBody台数 1台	利用可能 InBody台数 1台
利用可能アカウント数 管理者アカウント1、スタッフアカウント2	利用可能アカウント数 管理者アカウント1、スタッフアカウント2

B. LookinBody Web の基本料金

LookinBody Web の契約料金は基本プランとオプションで構成されます。InBody の接続台数の追加や、必要なスタッフアカウント数の追加によって金額が異なります。

	契約料金	3,000円/月
基本プラン	利用可能 InBody 台数	1台
	利用可能アカウント数	管理者アカウント 1、スタッフアカウント 2
	接続 InBody の追加	1台 3,000円/月
オプション	スタッフアカウントの追加	1アカウント 6,000円
	フランチャイズ管理者用アカウントの利用 ^{※2}	5,000円/月

無料体験版のご利用方法(基本 30 日間)

【基本プランの全てを使用可能にする登録手順】

1. パソコンから <https://jpn.lookinbody.com> に接続して、管理者ログインで新規登録します。※3
2. ログイン画面の左下にある【ユーザーマニュアル】をダウンロードします。
3. 登録した ID でログインすると、【チュートリアル】が表示されます。
4. チュートリアルの案内に従って InBody の設定を完了し、測定を行います。※4
5. LookinBody Web の画面やスマートフォンの InBody アプリから結果が表示されることを確認します。※5

※3 インターネットブラウザは、Google Chrome(Ver.72.0 以後)を推奨します。

※4 クラウドサーバーにデータを送るには、測定時に画面上で「個人情報の取り扱いについて」に同意し、ID を入力する必要があります。

※5 スマートフォンで測定結果を確認するには、測定時に画面上で携帯番号を入力し、同じ番号で InBody アプリに新規登録する必要があります。

【無料体験版ご利用前の確認事項】

1. 対応機種: InBody970・BWA・770・570・470・370S・270 ※6
 2. 使用環境: InBody を有線 LAN か Wi-Fi に接続できる環境 ※7
- ※6 対応機種でも 2019 年 7 月以前に導入された機器はアップデートが必要です。近くの営業所にお問い合わせください。
※7 安定的な通信状態を維持するには有線 LAN をお勧めします。Wi-Fi は契約プランの仕様によって繋がらない場合があります。

有料正式版のご購入方法(有料転換)

【お支払い方法】

1. 無料体験期間中、画面にはアカウントの有効期限が表示され、この期限を過ぎるとアクセスができません。
2. アクセス権は使用環境に応じるライセンス料を支払うことで再度与えられ、支払い方法には 2 種類があります。
 - 見積兼注文書の発行を依頼し、現金振り込みでライセンスを購入する。※9 ※10
 - インボディ楽天市場店(<https://www.rakuten.co.jp/inbody>)でライセンスを購入する。
3. 購入したライセンスがアカウントに反映されるには、最長 1 営業日が所要します。

※9 現金振り込みの場合、1 年単位のみ購入が可能です。インボディ楽天市場店は、6・12 ヶ月単位で購入することができます。

※10 途中の契約解除を希望する場合、月割りの計算で払戻しとなり、1 ヶ月に満たない日数は 1 ヶ月に繰り上げられます。また、解約事務手数料として、3,000 円(税抜)を払戻し金額から差し引かさせていただきます。

