



InBody 測定方法 :Wi-Fi接続時

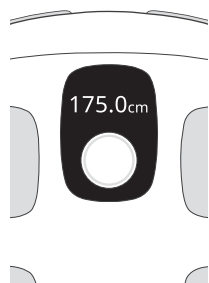

ダイヤルを回して
身長を入力してください。

- 1 電源を点けて、ダイヤルボタンを回して、身長を入力してください。

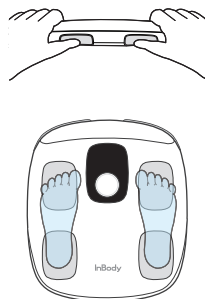


- 2 手電極を握って、体重を測定してください。




ダイヤルを回して
使用者コードを選択後に
測定してください。

- 3 認識された使用者コードを確認してください。

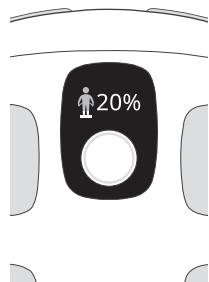

手電極を握って
腕を伸ばしてください。

- 4 体重測定完了後、手電極を握って測定姿勢を取ってください。

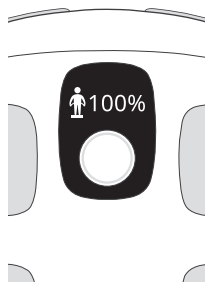

データ送信完了

- 5 測定完了後、アプリに測定結果が同期されます。



- 6 アプリを起動して測定した結果が同期されているか確認してください。

InBody測定方法 :Bluetooth 連動時



- 1 「InBody測定記録」を選択してください。



- 2 「InBody Dial 測定開始」を選択してください。



- 3 測定者を選択してください。



- 4 身長が正しいか確認して「測定開始」を選択してください。



- 5 体重測定完了後、手電極を握って測定姿勢を取ってください。



- 6 測定完了後、アプリに測定結果が同期されます。
*2回目以降の測定は「ダッシュボード」>「新規測定」を選択してください。




Wi-Fi 接続後に使用者認識機能でInBody測定を行った場合、同期作業をしなくてもアプリにデータが記録されます。



InBodyアプリとInBody Dial H30を連動するには、スマートフォン端末のBluetooth機能を有効にする必要があります。

STEP 1. 個人情報の新規登録

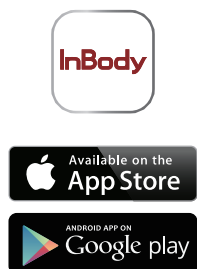

1 InBodyアプリをダウンロードしてください。ダウンロード完了後、アプリを起動してください。



2 携帯番号を入力して「確認」を選択してください。



3 メールアドレスを入力してください。入力後、受信されたメールで「認証」をタップしてください。



4 パスワードを設定してください。



5 生年月日・性別・身長を登録してください。



6 約款を確認し、「同意」にチェックして「完了」を選択すると、登録完了となります。

STEP 2. 製品を登録する



1 個人情報の登録後に機器の登録画面が表示されます。「InBody Dial H30」を選択してください。



2 InBody Dialの電源を入れて、スマートフォンのBluetooth機能が有効になっているか確認してください。



3 ペ어링設定を行うため、InBody Dialとスマートフォンを近づけてください。



4 使用者コードの入力して「確認」を選択してください。



5 Wi-Fi接続を設定すると、測定結果がアプリに自動で同期されます。



6 登録完了後、測定を行うことができます。



認証が完了しない場合は、カスタマーセンターまでご連絡ください。
 カスタマーセンター Tel: 0120-900-369 受付時間：平日9:00~18:00(土・日・祝日は休み)



InBodyアプリとInBody Dial H30を連動するには、スマートフォン端末のBluetooth機能を有効にする必要があります。