

アプリでInBody結果が管理できます。

- * 測定時にIDと携帯番号を入力する必要があります。
- * IDを入力して測定する場合、インボディ・ジャパンの方針に則り測定データを当社スタッフが閲覧できるようになりますので、そのことにご承知いただいた上でサービスにお申し込みください。

まずはInBodyアプリをダウンロードしてください。



InBody (無料)

App Store、またはGoogle Play
ストアからアプリケーションをダウン
ロードできます。



アプリのダウンロード
【iOS版】



アプリのダウンロード
【Android版】

<互換性> ○ iPhone: iOS13.0以上 ○ Android: 7.0以上

* タブレット端末ではアプリケーションをダウンロードできません。* 通信環境がない場所ではアプリケーションを起動することができません。

* 二次元コードが読み取れない場合はGoogle Playストア、またはApp store内から「インボディ」で検索してください。

アプリを起動して新規登録を行ってください。



インストールしたアプリを起動し、「新規登録」を選択します。



携帯番号とメールアドレスを入力し、メール認証を行います。



受信フォルダを開いて認証メールが届いているか確認します。*キャリアメールは受信されない場合がありますので、別のメールアドレスをお試しください。



認証番号をアプリに入力し、「認証」を選択します。




パスワード・生年月日・性別・身長の順に個人情報登録します。



個人情報の取り扱いに同意すると、最初の画面に戻ります。登録した携帯番号とパスワードを入力してログインします。



ログイン後に製品設定画面が表示されたら、その他の「なし」を選択します。登録は以上になります。

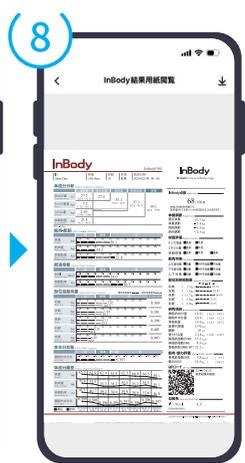

全体の測定結果は「詳細」から閲覧します。結果用紙イメージをダウンロードすることもできます。

InBodyアプリについてご不明な点がございましたら、

株式会社インボディ・ジャパン カスタマーセンター（フリーアクセス 0120-900-369）までお問い合わせください。【受付時間：平日9:00～18:00】