

## InBody アプリ+\_InBody アプリとのデータ連携

### InBody アプリとの測定データ連携

初回測定後、下記の操作からデータ連携ができます。

#### 【設定方法】

1. 初期画面で環境設定(歯車アイコン)を選択後、「InBody 測定結果を選択後表示される「InBody アプリの結果を～」で有効を選択するとデータ連携を進めることができます。



2. 「測定結果の連携」を選択後、InBody アプリに登録した携帯番号とパスワードを入力して「InBody アプリログイン」を選択します。規約を確認し、全ての規約に同意して「次へ」を選択後、データの検出画面が表示され、画面が変わった後に「保存」を押すと連携が完了します。



上記の操作をしてもデータ連携ができない場合などは、下記のカスタマーセンターまで気軽にお問い合わせください。

株式会社インボディ・ジャパン カスタマーセンター連絡先

Tel: 0120-900-369 (受付時間:平日 9~12 時、13~18 時) Mail: [customer-support@inbody.co.jp](mailto:customer-support@inbody.co.jp)