



DIAL H40

再設定の方法について



データを連動するInBodyDialが変わると、アプリで製品を再設定する必要があります。
また、製品とのペアリングができない場合も、アプリの再設定を行うことで、殆どの問題が解決されます。再設定の手順は下記の通りです。

再設定の操作方法



① InBody+アプリを起動し、
環境設定を選択します。

環境設定ボタン



③ 接続機器解除を選択します。



④ [機器削除]を選択します。

接続を解除しても、過去の測定データは削除されません。



② 機器管理を選択します。



⑤ 機器の接続解除は以上となります。次に新たなInBodyDialを登録してください。